



## terralin® protect

Vloeibaar concentraat voor desinfectie en reiniging van medische hulpmiddelen op basis van een combinatie van aromatische alcoholen, quaternaire ammoniumverbindingen, amfotere glycinederivaten en niet-ionogene oppervlakreactieve stoffen.

### Our Plus:

- aldehyde vrij
- biedt eersteklas hygiënische bescherming
- geeft een uitstekend visueel resultaat
- ruikt aangenaam fris en onopvallend

### Toepassingsgebied

Desinfectie en reiniging van medische hulpmiddelen [CE 0297]

- in het ziekenhuis
- vooral waar geur een belangrijke rol speelt
- op gevoelige materialen, zoals acrylglas (bijv. couveuses)
- bij kritische/gevoelige producten

### Aanwijzingen voor het gebruik

Maak de gebruiksooplossing aan in de gewenste concentratie.

De schülke doseerhulp helpt u bij het aanmaken van de juiste dosering van het preparaat. Dosering is mogelijk via centrale en niet-centrale doseerapparaten.

Neem de medische producten, resp. vloeren en andere afneembare oppervlakten met een bevochtigde doek af. Let er altijd op dat het oppervlak grondig natgemaakt wordt. Reinig de uitrusting goed met water.

Door het gehalte aan kationische werkzame stoffen kan vermenging met reinigingsproducten of vloeibare verzorgingsproducten invloed hebben op de microbiologische werking van het preparaat en problemen met de toepassing ervan veroorzaken. Daarom dient vermenging van preparaten uitsluitend plaats te vinden na voorafgaand overleg met schülke.

terralin® protect reinigt uitstekend, zodat een aanvullend gebruik van reinigingsadditieven normaal gesproken niet nodig is. Afhankelijk van het type vloer en de kwaliteit ervan kan aanvullend onderhoud zinvol zijn.

### Microbiologische werkzaamheid

terralin® protect werkt tegen:

- Bacteriën (incl. tbc en MRSA) • Schimmels • Virussen (bijv. hepatitis B-virussen, HIV, rotavirussen, adenovirussen)

### Gebruikskoncentratie / inwerktijd

Werkzaamheid	5 min.	15 min.	60 min.	2 uur	4 uur
DGHM <sup>1</sup> / VAH Oppervlakte-desinfectie in ziekenhuis en praktijk incl. MRSA		2 % (20 ml/l)	0,5 % (5 ml/l)		0,25 % (2,5 ml/l)
Tb <sup>2</sup>				0,5 % (5 ml/l)	0,25 % (2,5 ml/l)
beperkt virucide <sup>3</sup> (incl. HIV, HBV en HCV)		1 % (10 ml/l)	0,5 % (5 ml/l)		
HCV		0,25 % (2,5 ml/l)			
Vacciniavirussen		1 % (10 ml/l)	0,5 % (5 ml/l)		
Rotavirussen		0,25 % (2,5 ml/l)			
Polyoma SV40 zonder belasting		0,5 % (5 ml/l)			
met belasting		1 % (10 ml/l)			
Adenovirussen					2 % (20 ml/l)
Norovirus <sup>4</sup> zonder belasting			0,5 % (5 ml/l)		
met belasting				2 % (20 ml/l)	0,5 % (5 ml/l)
Norovirus <sup>5</sup> zonder belasting				1 % (10 ml/l)	
met belasting				2 % (20 ml/l)	
Badkuip	conc.				


<sup>1</sup> volgens nieuwe standaardmethoden

<sup>2</sup> in suspensieproef

<sup>3</sup> overeenkomstig RKI-aanbeveling Bundesgesundheitsblatt 01/2004) getest met het surrogaatvirus FCV (feline calicivirus)

<sup>4</sup> getest met het surrogaatvirus FCV (feline calicivirus)

<sup>5</sup> Muriel Norovirus overeenkomstig EN 14 476

 <b>Nu al getest volgens de euronormen voor levensmiddelen, industrie en openbare inrichtingen:</b>		<b>60 min.</b>
<b>EN 1276</b>	(bactericide, met belasting)	0,5 % (5 ml/l)
<b>EN 1650</b>	(fungicide, met belasting)	0,5 % (5 ml/l)
<b>EN 13697</b>	(bactericide, met/zonder belasting, kwantitatieve oppervlaktetest)	0,5 % (5 ml/l)
<b>EN 13697</b>	(fungicide, met/zonder belasting, kwantitatieve oppervlaktetest)	0,5 % (5 ml/l)

## Productgegevens

Samenstelling 100 g bevat: 22 g quaternaire ammoniumverbindingen, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloriden, 17 g 2-fenoxy-etha nol, 0,9 g aminoalkylglycine (aminen, n-C10-16-alkyl-tri methylenedi-, reactieproducten uit chloorazijnzuur).

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) Nr. 648/2004: 5 – 15 % niet-ionogene oppervlakreactieve stoffen, parfums

### Chemisch-fysische gegevens:

Aspect:	heldere, groene vloeistof
Dichtheid (20 °C):	ca. 1,01 g/cm <sup>3</sup>
pH-waarde concentraat:	ca. 8,6
pH-waarde 0,5 % oplossing:	ca. 8 – 9

## Etikettering overeenkomstig EG-richtlijnen

- C:** Bijtend.
- N:** Milieugevaarlijk.
- R22:** Schadelijk bij opname door de mond.
- R34:** Veroorzaakt brandwonden.
- R50:** Zeer vergiftig voor in het water levende organismen.
- S26:** Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.
- S35:** Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.
- S36/37/39:** Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen (b. v. butylrubber) en een beschermingsmiddel voor de ogen/het gezicht.
- S45:** Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).
- S61:** Voorkom lozing in het milieu. Vraag om speciale instructies/veiligheidskaart.

## Leveringsvormen / Verpakkingseenheden

Grootte	Verpakkingseenheid
2 liter-fles	5 x 2 l
5 liter-vat	1 x 5 l

## Accessoires / Doseerhulp

	Art.-nr.
Doseerhulp tweeliterfles (20 ml/1 x omkeren)	183 401
Kraan 5 en 10 liter vat	135 501
Kraan 30 liter vat	126 101
Doseerpomp 5 en 10 (20 ml/slag)	117 101
Sleutel 5 en 10 liter vat	135 810
Sleutel 30 l vat	135 901

Vraag onze brochure Hygiëneteknik aan voor uitvoerige informatie over onze doseerapparaten.

## Milieu-informatie

Een overzicht van alle rapporten/literatuur over het preparaat terralin® protect vindt u op internet op [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)

Als u verder nog vragen hebt:

Customer Care

tel. International: +49 (0)40- 521 00-666

E-Mail International: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)

tel. Nederland: +31-23-535 26 34



Schülke & Mayr GmbH is certified according to DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 and DIN EN ISO 13485 (Reg.-No. 004567-MP23) and has a validated environmental system in accordance with the Eco Audit Regulation (Reg.-No. DE-150-00003).

Schülke & Mayr GmbH  
22840 Norderstedt, Germany  
Phone +49 (0) 40 - 521 00 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 521 00 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)

Schülke & Mayr UK Ltd.  
1 Jenkin Road  
GB-Sheffield S9 1AT  
Phone +44 (0) 1142 - 54 35 - 00  
Fax +44 (0) 1142 - 54 35 - 01  
[mail.uk@schuelke.com](mailto:mail.uk@schuelke.com)

Schülke & Mayr Ges.m.b.H  
Seidengasse 9  
1070 Wien, Austria  
Phone +43 (0) 1 - 523 25 01 - 0  
Fax +43 (0) 1 - 523 25 01 - 60  
[office.austria@schuelke.com](mailto:office.austria@schuelke.com)