

Desinfektionsplan Podologie/Kosmetik/Nail/Tattoo/Piercing/Coiffeur

Was	Womit	Wann	Wie	Zubereitung der Lösung
 Händewaschen	esemtan® wash lotion	Vor Arbeitsbeginn, nach Arbeitsende, bei sichtbar verschmutzten Händen	Hände waschen, gut nachspülen und mit Einmalhandtuch abtrocknen.	Gebrauchsfertige Waschlotion Wie handelsübliche Präparate anwenden
 Händedesinfektion	desderman® care / gel, desmanol® pure / gel	Vor und nach Behandlung, bei sichtbarer Verschmutzung, vor und bzw. nach Benutzung von Handschuhen	<u>Hygienische Händedesinfektion</u> : 30 Sekunden in den Händen einreiben <u>Chirurgische Händedesinfektion</u> : 90 Sekunden in den Händen einreiben	Fertige Gebrauchslösung Keine Wasserzugabe
 Händepflege	esemtan® skin lotion	Vor grossen Pausen, nach Arbeitsende	Nach dem Händewaschen und / oder der Händedesinfektion die Lotion gut einreiben.	Gebrauchsfertige Handlotion
 Hautdesinfektion	kodan® forte farbl./gefä., octeniderm®	Vor operativen Eingriffen, Injektionen und Punktionen	Betreffende Hautstelle mit Desinfektionsmittel benetzen und einwirken lassen. Injektionen: 15 Sekunden. Punktionen: 60 Sekunden	Fertige Gebrauchslösung Keine Wasserzugabe
 Schleimhaut-, Wund-, und Hautdesinfektion, Verbrennungen	octenisept®	Vor diagnostischen und operativen Massnahmen, zur Wundbehandlung	Mit Tupfer auftragen, die zu desinfizierenden Stellen vollständig benetzen und 1 Minute einwirken lassen.	Gebrauchsfertige, wässrige Lösung
 Chirurgisches Instrumentarium, Wurzelbehandlungs-Nadeln, Poliergummis, Poliersteine und Anästhesiezubehör	gigasept® instru AF	Nach jedem Gebrauch	Instrumente einlegen, nach 30 Minuten Einwirkzeit mechanisch reinigen, abspülen und ggf. sterilisieren. Die Einsatzkonzentration / Einwirkzeit nach EN / prEN lautet: 3,0% – 15 Min., 2,0% – 30 Min., 1,5% – 60 Min. Im Ultraschall: 3,0%/5 Minuten (Standzeit der Lösung 1 Tag).	<u>2%ige Desinfektionslösung</u> 20 ml gigasept® instru AF und 980 ml Wasser Einwirkzeit und Standzeit der Lösung beachten.
 Stahl- und Hartmetallbohrer, Fräser und Diamanten	rotasept®	Sofort nach jeder Behandlung	Trocken im Bohrer- oder Ultraschallbad vorlegen, Desinfektionspräparat zugeben, auf vollständige Benetzung achten und Einwirkzeit einhalten. Wenn Sterilisation erforderlich: Zuvor abspülen und trocknen.	Im Bohrerbad: unverdünnt Im Ultraschall: unverdünnt Standzeit der Gebrauchslösung: 1 Tag
 Alkoholische Schnelldesinfektion von Medizinprodukten, Geräten, Mobiliar und Flächen aller Art	mikrozid® AF liquid, wipes, wipes Jumbo, wipes premium	Nach jeder Benutzung	Oberflächen mit mikrozid® AF gründlich wischen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Einwirkzeit: 1 Minute	Alkoholische gebrauchsfertige Lösung / Tücher (Acrylglas, lackiertes Holz nicht mit mikrozid® AF behandeln!)
 Schnelldesinfektion für alkoholempfindliche Oberflächen von Medizinprodukten, Geräten, Mobiliar und Flächen aller Art	mikrozid® universal liquid, wipes premium	Nach jeder Benutzung von alkoholempfindlichen Flächen	Oberflächen mit mikrozid® universal gründlich wischen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Einwirkzeit: 1 Minute	Gering alkoholische gebrauchsfertige Lösung / Tücher
	mikrozid® sensitive liquid, wipes, wipes premium	Nach jeder Benutzung von alkoholempfindlichen Flächen	Oberflächen mit mikrozid® sensitive gründlich wischen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Einwirkzeit: 1 Minute	Alkoholfreie gebrauchsfertige Lösung / Tücher
 Fussböden, Sanitärbereich, Inventar, Geräte und Mobiliar	terralin® protect	Täglich oder nach Kontamination und Verschmutzung	Flächen feucht-nass abwischen / Handschuhe tragen. Einwirkzeit: 1 Stunde	<u>0,5%ige Desinfektionslösung</u> 5 ml Konzentrat auf 995 ml Wasser = 1000 ml Desinfektionslösung