

schülke -+



Berührungslos bedienbarer Spender für Händedesinfektionsmittel, Wasch- und Pflegelotionen zur Wandmontage oder freistehend auf einem Standfuß nutzbar.

Präparatespender RL1 Touchless

Unser Plus:

- für 500 ml- und 1 l-schülke-Flaschen geeignet
- zur Wandmontage oder freistehend nutzbar¹
- Abtropfschale im Lieferumfang enthalten
- Einzelteile auch separat erhältlich
- Gebinde komplett entleerbar, weil diese kopfüber eingesetzt werden
- zwei einfach einstellbare Dosierstufen
- Sprüh-Vernebelung installierbar²
- Sicherheits-Stopp: bei geöffneter Abdeckung ist keine Entnahme möglich
- Batterie- und Netzbetrieb möglich³
- einfache Aufbereitung mittels alkoholischer Schnelldesinfektion (z. B. mikrocid® AF)
- versperert
- Standfuß besteht aus drei Einzelteilen: kann platzsparend verstaut und bei Bedarf in unterschiedlichen Höhen eingesetzt werden.

Funktionsbeschreibung

Einfache Dosierung von Händedesinfektionsmittel (liquid und Gel), Wasch- und Pflegelotionen mittels inkludiertem Pumpaufsatz (1,5 ml / Hub). Über separat erhältlichen „Pumpaufsatz-Sprühkopf“ können flüssige Händedesinfektionsmittel sprüh-vernebelt werden.

Der Präparatespender RL1 Touchless ist versperert und kann nur mit einem Schlüssel geöffnet werden. Der Flaschenwechsel erfolgt bei geöffneter Abdeckung. Die leere Flasche wird entnommen, der Pumpaufsatz abgenommen und auf die neue Flasche geschraubt, die kopfüber wieder in den Spender eingesetzt wird (s. Bilderreihe).

Einfache Justierung der Dosiermenge: Bei geöffneter Abdeckung kann per Knopfdruck eingestellt werden, ob ein Hub (1,5 ml) oder zwei Hübe (3 ml) pro Entnahme verabreicht werden (1x drücken: 1 Hub, 2x drücken: 2 Hübe; s. Beschreibung der Motoreinheit).

Das Spendergehäuse wird direkt an die Wand bzw. an die Spenderhalterung des Standfußes montiert (Schrauben und Dübel mitgeliefert; alternativ ist ein Klebe-Set erhältlich). Es ist keine Wandhalterung erforderlich. Das Innenleben des Spenders („Motoreinheit“) kann bei Bedarf einfach entnommen und getauscht werden. Die Tropfschale kann bei verschlossenem Spender angesteckt oder abgenommen werden.

Der Präparatespender RL1 Touchless kann einfach und sicher desinfiziert werden - z. B. mit mikrocid® AF. Für eine hygienische Anwendung empfehlen wir abhängig von der Nutzung einen regelmäßigen Austausch des Pumpaufsatzes (z. B. vierteljährlich).

Flaschenwechsel



Spender mit Schlüssel entsperren



Abdeckung aufklappen



Leere Flasche entnehmen und Pumpaufsatz abschrauben



Pumpaufsatz auf neue Flasche aufsetzen*



Neue Flasche in den Spender einsetzen



Abdeckung zuklappen

¹ Standfuß separat erhältlich

² „Pumpaufsatz – Sprühkopf“ separat erhältlich

³ Netzteil und Batterien nicht im Lieferumfang enthalten

⁴ Für eine hygienische Anwendung empfehlen wir abhängig von der Nutzung einen regelmäßigen Austausch des Pumpaufsatzes (z. B. vierteljährlich).



Präparatespender RL1 Touchless

Technische Daten

- für 500 ml- und 1 l-schülke-Flaschen
- Füllstandkontrolle: ständig durch transparentes Gehäuse
- Abmessungen Spender (ohne Abtropfschale):
H 318 x B 154 x T 108 mm

Technische Angaben

Gehäuse:	Kunststoff
Tropfschale:	Kunststoff
Dosierung:	1,5 ml/Hub
Gewicht:	0,770 kg
Schlüssel:	Kunststoff
Montage:	mit 4 Schrauben und Dübeln direkt an die Wand bzw. an die Spenderhalterung des Standfußes. Wandmontage alternativ mit Klebsystemen (z. B. glabete) möglich.
Betriebsspannung:	DC 6V 1.5A
Batterien:	4 x Baby C / LR14 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Bestellinformation

Artikel	Art.-Nr.
Präparatespender RL1 Touchless, weiß (für 500 ml- und 1 l-schülke-Flaschen) inkl. Abtropfschale, Schlüssel und Pumpaufsatz, exkl. Batterien und Netzteil	60000464
RL1 T Standfuß, weiß	60000468
RL1 T Netzteil mit EU-Stecker	60000466
RL1 T Pumpaufsatz	60000467
RL1 T Pumpaufsatz - Sprühkopf	60000469

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Abmessungen

Spender auf Standfuß

Standfuß mit Spenderhalterung




Geöffneter Spender



- 1 Rückwand
- 2 Flasche
- 3 Stromanschluss
- 4 Pumpaufsatz
- 5 Motoreinheit
- 6 Einstellung der Dosiermenge (1 x drücken für einen Hub, 2x drücken für 2 Hübe pro Anwendung)
- 7 rotes Licht (leuchtet bei Störung bzw. wenn die Batterie leer ist)
- 8 grünes Licht (leuchtet bei Produkt-Entnahme und bei Dosierungseinstellung)
- 9 Batteriefach
- 10 Touchless-Sensor

Motoreinheit im Detail

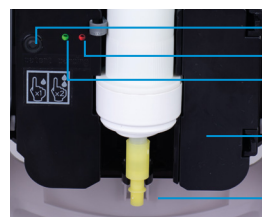

Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.at.

Für individuelle Fragen wenden Sie sich bitte an den für Sie zuständigen schülke-Außendienstmitarbeiter oder an cs1.austria@schuelke.com.



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Österreich
Schülke & Mayr GmbH
Seidengasse 9
1070 Wien, Österreich
Tel. +43 (1) 523 25 01
Fax +43 (1) 523 25 01 - 60
www.schuelke.at
office.austria@schuelke.com