



Alkoholische Gebrauchslösung zur Desinfektion von Flächen.

perform® classic alcohol EP

Unser Plus

- schnell und rückstandsfrei
- gebrauchsfertig
- farbstoff- und parfümfrei
- Euro-Normen geprüfte Wirksamkeit

Anwendungsgebiete

Zur Desinfektion von Flächen in Bereichen, in denen eine schnelle mikrobiologische Wirksamkeit gefordert ist.

Anwendungshinweise

perform® classic alcohol EP ist gebrauchsfertig und wird unverdünnt angewendet. Flächen, Anlagen oder Arbeitsgeräte vollständig benetzen und einwirken lassen. Das Präparat trocknet von der behandelten Oberfläche schnell ab. Besonders alkoholempfindliche Flächen, wie z.B. Acrylglas, dürfen nicht behandelt werden.

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid <i>EN1276, EN13697</i>	gebrauchsfertig	1 Min.
fungizid <i>EN1650, EN13697</i>	gebrauchsfertig	2 Min.
begrenzt viruzid <i>gemäß DVV-/RKI-Leitlinie</i>	gebrauchsfertig	30 Sek.



perform[®] classic alcohol EP

Produktdaten

Zusammensetzung:
100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe: 25 g Ethanol (94 %ig), 35 g Propan-1-ol

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	0,890 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	27 °C / Methode : DIN 51755 Part 1
Form	flüssig
pH	5,5 - 8,5 / 100 % / 20 °C

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden.
Das Tragen von Schutzhandschuhen (z.B. aus Nitrilkautschuk) wird empfohlen.

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
perform classic alcohol EP 1 l FL	10/Karton	113908
perform classic alcohol EP 10 l KA	1/Kanister	113909
perform classic alcohol EP 200 l FA	1/Fass	113910

Anwendungshilfen

Anwendungshilfen	Art.-Nr.
Druckluftspritze	120001
Kanisterschlüssel für 5/10 l Kanister	135810
Trichter	117901

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.at

Für individuelle Fragen:

Customer Sales Service Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Österreich
Schülke & Mayr GmbH
Seidengasse 9
1070 Wien, Österreich
Tel. +43 (1) 523 25 01
Fax +43 (1) 523 25 01 - 60
www.schuelke.at
office.austria@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com