



zur Therapie vaginaler Infektionen mittels octenisept®

## Vaginal Applicator

### Unser Plus

- einfache und diskrete Handhabung
- optimale Benetzung der vaginalen Epitheloberfläche
- effizient gegen ein breites Erregerspektrum (Bakterien und Pilze)
- auch in der Schwangerschaft anwendbar
- farblos


### Anwendungsgebiete

Der Applikator kann in Kombination mit dem Antiseptikum octenisept® 50ml intravaginal zur Therapie von bakteriellen Vaginosen und Pilzkrankungen im Vulvogenitalbereich eingesetzt werden.

### Anwendungshinweise

- Entnehmen Sie vor der ersten Anwendung den Applikator (c) aus der Hülle und setzen ihn nach Entfernen der durchsichtigen Schutzkappe (a) und des Sprühkopfes (b) auf die 50ml octenisept® Flasche.
- Der Sprühmechanismus kann in unterschiedlichen Winkeln der Flasche betätigt werden.
- Wir empfehlen Ihnen, auf der Toilette sitzend oder im Bett liegend den Applikator tief in die Scheide einzuführen. Drücken Sie nun 10 x mit dem Zeigefinger auf die Kappe des Applikators, um so das Präparat tief innerhalb der Scheide zu verteilen.
- Nach Anwendung sprühen Sie mit nach unterm gerichteten Applikator etwas Flüssigkeit (z.B. über dem Waschbecken) aus. Spülen Sie den Applikator danach unter fließendem Wasser ab und trocknen Sie ihn ggf. mit einem sauberen Tuch oder Papier.
- Sie können nun die Flasche bis zur nächsten Anwendung stehen lassen.
- Vor erneuter Anwendung ein- bis zweimal mit nach unten gerichtetem Applikator ansprühen und danach die Behandlung wie beschrieben durchführen.

- Der Applikator kann für die Dauer eines Behandlungszyklus verwendet werden. Nach Abschluss der Vaginaltherapie ist der Applikator zu entsorgen.

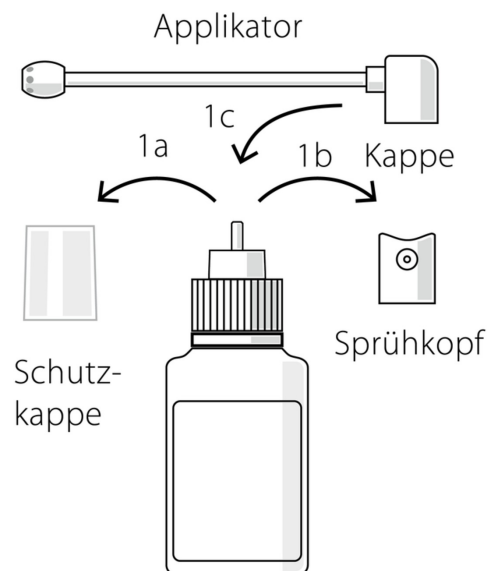

# Vaginal Applicator

## Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
Vaginal Applicator -INT-	20/Karton	70001128

## Anwendungshilfen

Anwendungshilfen	Art.-Nr.
octenisept 50 ml FL	121422

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Präparat finden Sie im Internet unter [www.schuelke.at](http://www.schuelke.at).

Für Ihre individuellen Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +49 (0)40 521 00-666

E-Mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

**schülke Österreich**  
Schülke & Mayr GmbH  
Seidengasse 9  
1070 Wien, Österreich  
Tel. +43 (1) 523 25 01  
Fax +43 (1) 523 25 01 - 60  
[www.schuelke.at](http://www.schuelke.at)  
[office.austria@schuelke.com](mailto:office.austria@schuelke.com)

**schülke Hauptsitz**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)