

# schülke -†



Zum Training und zur Überprüfung der Händedesinfektion.

## schülke® optics

### Unser Plus:

- fluoreszierende Lösung zur Überprüfung der Händedesinfektion
- zum Kontrollieren der Ergebnisse der Einreibetechnik
- Sichtbarmachen von Lücken unter UV-Licht

### Anwendungsmethoden/- hinweise

Wie bei der hygienischen und chirurgischen Desinfektion werden die Hände mit schülke® optics eingerieben. Zum Sichtbarmachen von Benetzungslücken halten Sie die eingeriebenen Hände dann unter die UV-Lampe (366 nm).

Die fluoreszierende Lösung macht es möglich, dass nicht benetzte Hautpartien dunkel erscheinen – die Qualität der Händedesinfektion ist so genau zu bewerten.

### Lieferformen

	Art. Nr.
500 ml-Flasche	172 001

### Zubehör / Dosierhilfen


	Art. Nr.
Dosierpumpe für 500 ml/1 l	180 303

Detaillierte Informationen finden Sie in der schülke-Präparate-Information „Zubehör und Dosierhilfen“.

### Besondere Hinweise

**Präparat nicht zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion verwenden.**

Nur äusserlich anwenden. Nicht in die Augen bringen. Brennbar Flüssigkeit! Von Zündquellen, offenen Flammen und Kindern fernhalten. Möglichst im Dunkeln und nicht über 25 °C lagern. Behälter dicht geschlossen halten.

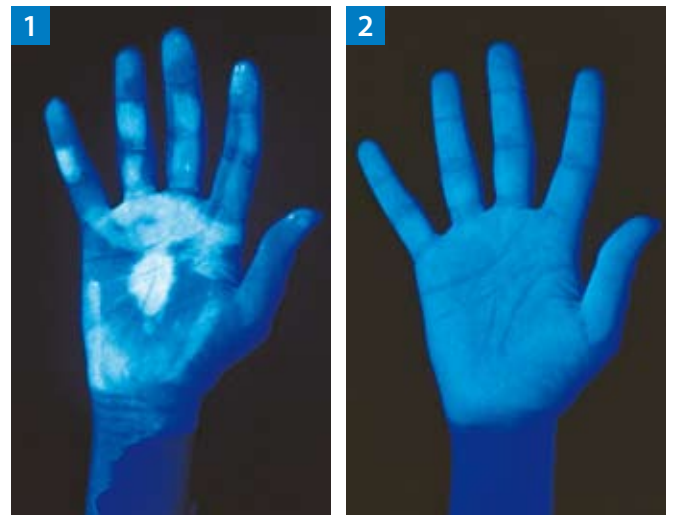

**Abb.1:**  
**Desinfizierte Hände mit Benetzungslücken**


Es ist deutlich zu erkennen, dass die Partien z. B. an Daumen und Fingerkuppen dunkel gefärbt sind. Hier weist die Benetzung deutliche Lücken auf.

**Abb. 2:**  
**So ist es richtig**

Keine Benetzungslücken sind zu erkennen – der Beweis für eine einwandfrei durchgeführte Händedesinfektion!

## Mangelnde Sicherheit durch eine lückenhafte Händedesinfektion.

Eine perfekte Händedesinfektion ist die wichtigste Massnahme der Infektionsprävention. Deshalb ist die richtige Anwendung der Mittel entscheidend.

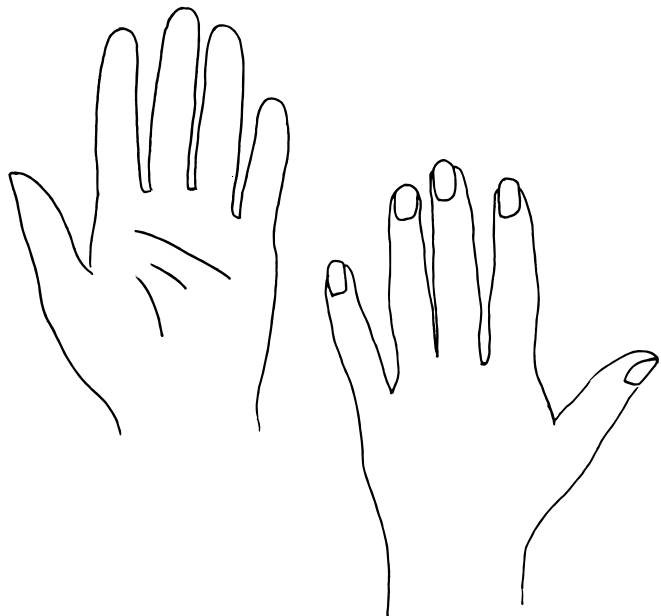

Markieren Sie nach der Anwendung von schülke® optics erkennbaren Benetzungslücken auf Handaußen- und -innenfläche.

Beachten Sie auch unsere Flyer und Aufkleber zu den Schritten der hygienischen Händedesinfektion.

## Informationen

Für Ihre individuellen Fragen:

Customer Sales Service: Telefon +41 (0) 44 466 55 44

Produkt-/Anwendungsberatung: mail.ch@schuelke.com

## Händedesinfektion – richtig gemacht!



**Schritt 1**  
Handfläche auf Handfläche.



**Schritt 4**  
Außenseite der Finger auf gegenüberliegende Handflächen mit verschränkten Fingern.



**Schritt 2**  
Rechte Handfläche über linkem Handrücken und linke Handfläche über rechtem Handrücken.



**Schritt 5**  
Kreisendes Reiben des rechten Daumens in der geschlossenen linken Handfläche und umgekehrt.



**Schritt 3**  
Handfläche auf Handfläche mit verschränkten, gespreizten Fingern.



**Schritt 6**  
Kreisendes Reiben hin und her mit geschlossenen Fingern der rechten Hand in der linken Handfläche und umgekehrt.



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG

Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.



**Schülke & Mayr GmbH**  
22840 Norderstedt, Germany  
Telefon +49 (0) 40 - 521 00 - 0  
Telefax +49 (0) 40 - 521 00 - 318  
www.schuelke.com  
mail@schuelke.com

**Schülke & Mayr AG**  
Sihlfeldstrasse 58  
8003 Zürich, Schweiz  
Telefon +41 (0) 44 - 466 55 44  
Telefax +41 (0) 44 - 466 55 33  
mail.ch@schuelke.com

**Schülke & Mayr Ges.m.b.H**  
Seidengasse 9  
1070 Wien, Österreich  
Telefon +43 (0) 1 - 523 25 01-0  
Telefax +43 (0) 1 - 523 25 01-60  
office.austria@schuelke.com