

Unser Plus

- sehr breites Wirkungsspektrum
- auf Basis von aktivem Sauerstoff
- nervorragende Materialverträglichkeit
- sporizid (C. difficile) gemäß EN 17126: 1% 120 Min. (clean conditions)

Anwendungsgebiete

Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und von Flächen aller Art. perform® eignet sich für den Einsatz in allen Risikobereichen, wo neben breiter Wirksamkeit hohe Anforderungen an das Umweltverhalten und die Anwenderfreundlichkeit eines Flächendesinfektionspräparates gestellt werden.

Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid EN16615, gemäß VAH - geringe Belastung	0,5 % (5 g/l)	60 Min.
bakterizid EN13727 - geringe Belastung	0,5 % (5 g/l)	5 Min.
bakterizid EN16615, gemäß VAH - geringe Belastung	1 % (10 g/l)	15 Min.
bakterizid EN13727 - geringe Belastung	1 % (10 g/l)	1 Min.
tuberkulozid EN14348 - geringe Belastung	2 % (20 g/l)	60 Min.
levurozid EN13624 - geringe Belastung	0,5 % (5 g/l)	60 Min.
levurozid EN16615, gemäß VAH - geringe Belastung	0,5 % (5 g/l)	60 Min.

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
levurozid EN13624 - geringe Belastung	1 % (10 g/l)	15 Min.
levurozid EN16615, gemäß VAH - geringe Belastung	1 % (10 g/l)	15 Min.
fungizid EN13624 - hohe Belastung	2 % (20 g/l)	60 Min.
begrenzt viruzid EN14476, gemäß DVV-/ RKI-Leitlinie	0,5 % (5 g/l)	5 Min.
begrenzt viruzid PLUS EN14476 - geringe Belastung	0,5 % (5 g/l)	5 Min.
viruzid EN14476 - geringe Belastung	1 % (10 g/l)	5 Min.
viruzid gemäß DVV-/RKI-Leitlinie - ohne Belastung	2 % (20 g/l)	5 Min.
Clostridium difficile EN13697 - geringe Belastung	1 % (10 g/l)	2 Std.
Clostridium difficile EN17126 - geringe Belastung	1 % (10 g/l)	2 Std.
Clostridium difficile EN17126 - geringe Belastung	2 % (20 g/l)	60 Min.

Anwendungsgebiet	Konzentration	Einwirkzeit
Badewannendesinfektion	1,5 % (15 g/l)	5 Min.
RKI-Listung gemäß § 18 lfSG Wirkungsbereich AB	3 % (30 g/l)	4 Std.





Listungen

- VAH-Zertifikat
- IHO-Liste
- RKI-Liste









Produktdaten

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe: 45 g Pentakalium-bis(peroxymonosulfat-) bis(sulfat) Kennzeichnung gemäß VO (EG) Nr. 648/2004: 5 - 15 % anionische Tenside, < 5 % nichtionische Tenside, < 5 % Phosphonate, < 5 % Seife, Duftstoffe

Chemisch-physikalische Daten

Farbe weiß

Flammpunkt Nicht anwendbar Form Granulat

pH ca. 4 / 5 g/l / 20 °C / in Wasser

Viskosität, dynamisch Nicht anwendbar

Besondere Hinweise

Anwendungshinweise:

Zum Ansetzen der Gebrauchslösung zuerst Wasser (möglichst handwarm) in Wanne oder Eimer geben, dann das Granulat einstreuen und kurz umrühren. Beispielsweise:

- 1 Beutel (~40 g) für 8 l Wasser = 0,5 %ige Lösung
- 2 Beutel (~80 g) für 8 l Wasser = 1 %ige Lösung

Beim Einsatz der Dose erfolgt eine entsprechende Dosierung gemäß der Dosiertabelle oder dem Dosen-Etikett. Die Gebrauchslösung in gewünschter Konzentration im 2-Mopp-Nass-Wisch-Verfahren auf Fußböden ausbringen bzw. Oberflächen von Medizinprodukten und andere wischbare Flächen feucht wischen. Zur Desinfektion von Masken und Übungspuppen, Einzelteile in die Gebrauchslösung einlegen und nach der Einwirkzeit mit Wasser abspülen. Angesetzte Gebrauchslösungen verfügen für eine Standzeit von max. 30 Stunden über eine gewährleistete

Standzeit von max. 30 Stunden über eine gewährleistete Wirkstoffstabilität. Bei starkem Schmutzeintrag sollte die Gebrauchslösung vorzeitig gewechselt werden. Durch die gute Materialverträglichkeit der Gebrauchslösung kann perform® auch bei Problemwerkstoffen, wie z. B. Acrylglas (Inkubatoren) eingesetzt werden. perform® ist auch zur Desinfektion von Atemschutz- und Inhalationsmasken, sowie Übungspuppen geeignet.

Besondere Hinweise:

Zur Vermeidung von Rückstandsbildungen auf behandelten Flächen sollte nach dem 2. Wischvorgang nur eine minimale Restfeuchte auf den Flächen verbleiben. Bei manchen Leitungswasserqualitäten kann bei Einsatz Aktivsauerstoffbasierter Desinfektionsmittel ein an Chlor erinnernder Geruch entstehen. perform® enthält jedoch keine Chlor-Komponenten.

perform® verfügt über gute Reinigungseigenschaften. Eine Abmischung mit Reinigungsverstärkern ist daher nicht erforderlich.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Auf vollständige Benetzung achten. Ausrüstung gut mit Wasser reinigen. Beutel bzw. Dose nicht über Raumtemperatur lagern. Das Tragen von Schutzhandschuhen (z. B. aus Butylkautschuk) wird empfohlen. Die Gebrauchslösung kann auf sehr empfindliche Textilfarbstoffe bleichend wirken. Nicht anwenden auf Teppichbodenbelägen.

BAG-RegNr.: CHZB0464

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	ArtNr.
perform (60x) 40 g BT	60/Karton	70001858
perform 900 g DS	4/Karton	122319

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt perform® finden Sie im Internet unter www.schuelke.ch.

Für individuelle Fragen: Customer Sales Service Telefon: +41 44 466 55 44

E-Mail: mail.ch@schuelke.com







Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel. schülke Schweiz
Schülke & Mayr AG
Hungerbüelstrasse 22
8500 Frauenfeld
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke Hauptsitz Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Str. 2 22851 Norderstedt Deutschland Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0 Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318 www.schuelke.com mail@schuelke.com