

schülke →



Saurer Enthärter für die thermische Aufbereitung von Steckbecken und Urinflaschen.

thermosept® SKS

Unser Plus

- verhindert den Aufbau von Kalkbelägen
- unterstützt eine rückstandsfreie Abtrocknung des Spülgutes
- schaumfrei, enthält keine Tenside
- besonders umweltschonend
- hohe Materialverträglichkeit bei Edelstahl und diversen Kunststoffen

Anwendungsgebiete

thermosept® SKS ist geeignet für die Verwendung zur thermischen Aufbereitung von Steckbecken und Urinflaschen. thermosept® SKS verfügt über spezielle Enthärterkomponenten zur Abbindung der Wasserhärte und sorgt für eine fleckenfreie Abtrocknung des Spülgutes. Das Produkt ist schaumfrei und bei allen Wasserhärten verwendbar.

Anwendungshinweise

Dosierung:

0,01 % pro 1° dH, das entspricht einer Dosierung von 0,1 - 0,3 %, (1 - 3 g/l Wasser).

Die Dosierung erfolgt über maschineneigene Dosierpumpen, diese sind auf Säurebeständigkeit zu prüfen.

Sollte eine starke Verkalkung des Heizstabes festgestellt worden sein, empfiehlt es sich, vor Einsatz von thermosept® SKS eine Entkalkung vorzunehmen (z.B. mit thermosept® NKZ oder thermosept® NKP). thermosept® SKS verhindert auch bei hartem hoher Wasserhärte Kalkablagerungen im Verdampfer.

CE 0297



Produktdaten

Zusammensetzung:

organische Säuren, Härtestabilisator, Korrosionsinhibitoren

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,08 g/cm ³ / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	> 100 °C
Form	flüssig
Viskosität, dynamisch	Keine Daten verfügbar

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
thermosept SKS SOKA 5 kg KA	1/Kanister	145803
thermosept SKS 5 kg KA	1/Kanister	145806

Anwendungshilfen

Anwendungshilfen	Art.-Nr.
Kanisterhahn für 5/ 10 l	135501
Kanisterschlüssel 5/ 10 l neutr.	135810

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick aller zum Präparat thermosept® SKS finden Sie im Internet unter www.schuelke.ch



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Schweiz
Schülke & Mayr AG
Hungerbühlstrasse 22
8500 Frauenfeld
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com