

schülke wipes safe & easy

Befüllung unter hygienischen Bedingungen.

safe & easy

bag

Hinweis


Zum Personalschutz sowie zum Schutz der schülke wipes safe & easy empfehlen wir die Arbeitsfläche und die Hände zu desinfizieren, sowie das Tragen von Schutzkittel, Schutzbrille und Handschuhen.*



Schritt 1


Öffnen Sie das selbsthaftende Siegelkettett des Bags.

Auf hygienisches Arbeiten achten, Handschuhe nicht während der Arbeit kontaminieren!

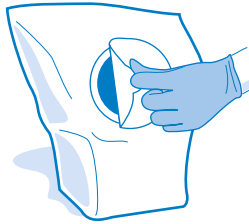


Schritt 2

Kleben Sie das Siegelkettett auf die Rückseite des Bags und füllen Sie es vollständig aus.

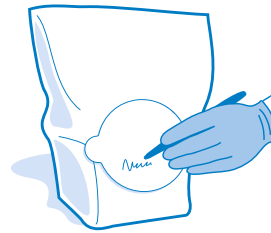

Schritt 3

Ziehen Sie das innerste Tuch der Rolle ein Stück heraus, gießen Sie einmalig 2 Liter bei einem gebrauchsfertigen Produkt** oder 3 Liter Gebrauchslösung aus einem angesetzten Konzentrat*** langsam spiralförmig über die Vliesrolle im Bag.

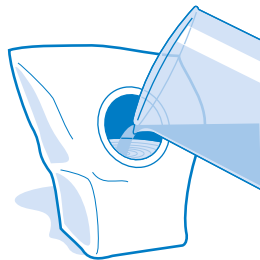

Schritt 4

Ziehen Sie das innerste Tuch der Vliestuchrolle in die sternförmige Entnahmeöffnung des Verschlusses und verschrauben Sie diesen mit dem Bag.



Schritt 5

Die Tücher sind nach 30 Minuten Wartezeit vollständig durchtränkt.

Verwerfen Sie das erste Tuch und verschließen Sie die Schutzkappe des Verschlusses sorgfältig.

30 Min.
warten



Schritt 6

Die schülke wipes safe & easy sind nun einsatzbereit.



Entsorgen Sie bitte den Bag mit etwaigen Produktresten und Tüchern nach Ablauf der Standzeit von bis zu 28 Tagen ordnungsgemäß.

* Gemäß TRBA 250, Absatz 4.1.3.

** antifact® N liquid, mikrozyd® AF liquid, mikrozyd® sensitive liquid, mikrozyd® universal liquid, terralin® liquid, buraton® rapid, perform® advanced alcohol EP, perform® classic alcohol EP

*** antifact® AF (N), antifact® extra, pursept® AF, terralin® protect, perform® classic concentrate Q-Plus, TPH protect