

# schülke →



## gigasept® AF forte

gigasept® AF forte est une préparation sans aldéhyde pour le nettoyage et la désinfection des endoscopes rigides et flexibles ainsi que des instruments chirurgicaux.

### Notre plus

- aldéhyde
- convient aux endoscopes flexibles et rigides
- temps d'action réduit dans le bain à ultrasons
- combinaison de l'ingrédient actif breveté

### Domaines d'utilisation

Nettoyage et désinfection d'endoscopes flexibles et rigides, d'instruments chirurgicaux, d'accessoires d'anesthésie ainsi que de masques respiratoires.

### Conseils d'utilisation

gigasept® AF forte est un concentré qui doit être dilué avec de l'eau froide pour obtenir la concentration d'utilisation souhaitée.

**Traiter les endoscopes flexibles avec une concentration d'application de 2% maximum!**

**Dosage:** selon le degré d'efficacité, 0,5 % - 5 %.

#### Exemple d'utilisation:

1 litre d'une solution d'utilisation à 5 % correspond à 950 ml d'eau et 50 ml de gigasept® AF forte.

Placer les instruments à préparer dans la solution gigasept® AF forte immédiatement après leur utilisation. Veiller à ce que les surfaces soient entièrement mouillées et laisser agir. Placer les instruments à corps creux de manière à ce que l'air s'échappe complètement de la lumière. Après l'utilisation, rincer soigneusement les instruments avec de l'eau de qualité au moins potable, de préférence avec de l'eau stérile aqua dest. ou de l'eau déminéralisée, afin d'éliminer complètement les résidus de la solution d'application.

Ne pas dépasser les temps d'action et les concentrations indiqués. Veuillez respecter les recommandations de traitement des fabricants d'instruments. Selon les recommandations de la KRINKO/BfArM, le nettoyage et la désinfection doivent être effectués en deux étapes distinctes.

Ne convient pas pour la désinfection finale de dispositifs médicaux semi-critiques et critiques!

#### Durée de vie:

Une durée d'utilisation de 7 jours s'applique si la solution d'application est utilisée exclusivement pour la désinfection d'instruments préalablement nettoyés. Si la solution d'application est utilisée pour le nettoyage, elle doit être renouvelée tous les jours ouvrables et en cas de contamination clairement visible.

### Efficacité microbiologique

Efficacité	Solution	Temps d'action
<b>Bactéries</b> EN13727, EN14561, Conformément à la VAH - en conditions de saleté	2 % (20 ml/l)	15 min
<b>Bactéries</b> EN13727, EN14561, Conformément à la VAH - en conditions de saleté	5 % (50 ml/l)	5 min
<b>Mycobactérie</b> EN14348, EN14563, Conformément à la VAH - en conditions de saleté	2 % (20 ml/l)	15 min
<b>Levure</b> EN13624, EN14562, Conformément à la VAH - en conditions de saleté	5 % (50 ml/l)	5 min
<b>activité virucide limitée</b> Conformément à la directive de la DVV (Association allemande de lutte contre les maladies virales, association déclarée) / RKI	1 % (10 ml/l)	5 min



## Données relatives au produit

### Composition:

100 g de solution de principe actif contiennent comme composants actifs : 10 g de chlorure de diméthylidioctylammonium, 15 g de phénoxypropanols, 15,6 g d'acétate d'alkylguanidine, 9,5 g de laurylpropylènediamine.

### Données physico-chimiques

Couleur	vert
Densité	env. 0,99 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
pH	9,8 - 10 / 100 % / 20 °C
Point d'éclair	62 °C / Méthode : DIN 51755 Part 1
Routine FORM	liquide
Viscosité dynamique	env. 60 mPa*s / 20 °C / Méthode : ISO 3219

## Remarques particulières

**Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant utilisation.** Destiné à être utilisé exclusivement par des professionnels. Les incidents graves liés au produit doivent être signalés au fabricant et aux autorités compétentes. Ne pas utiliser la préparation après la date de péremption. Tenir le récipient hermétiquement fermé. Protéger du gel, de la chaleur et des rayons du soleil. Conserver dans le récipient d'origine.

Avec une solution d'utilisation à 5 %, un contact accidentel avec les yeux peut entraîner une irritation des muqueuses. En raison de la combinaison de substances actives hautement efficaces, des troubles (opalescence) peuvent apparaître dans les solutions d'utilisation aux concentrations recommandées. Celles-ci sont spécifiques au produit et n'affectent ni les propriétés ni l'efficacité du produit. Outre la préparation manuelle, gigasept® AF forte convient également aux machines semi-automatiques qui fonctionnent par circulation à température ambiante.

### Interactions:

Ne pas mélanger gigasept® AF forte en général avec d'autres produits. En cas de contact de gigasept® AF forte avec des solutions d'application contenant des aldéhydes, des précipités et des décolorations irréversibles peuvent se produire.

## Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
gigasept AF forte -INT- 2 l FL	5/Carton	70003412
gigasept AF forte 5 l KA	1/jerrycan	125603
gigasept AF forte -INT- 5 l KA	1/jerrycan	70003413

## Accessoires

Accessoires	N° art.
Kanisterhahn für 5/ 10 l	135501
Kanisterschlüssel 5/ 10 l neutr.	135810
Wannen-Set 10 l Deckel transp. SE	144508
Wannen-Set 30 l Deckel transp. SE	144608
Wannen-Set 30 l Hahn/Deckel transp SE	144610
Wannen-Set 3 l Deckel transp. SE	144308
Wannen-Set 5 l Deckel transp. SE	144408

## Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et dans le respect de normes de qualité sévères.

## Avis d'expert et information

Vous trouverez dans notre site internet, sous [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch), un aperçu de toutes les expertises/toute la littérature disponibles sur la préparation gigasept® AF forte.

Pour vos questions individuelles:

Customer Sales Service

Tél.: +41 44 466 55 44

E-mail: [mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)



GEPRÜFTES  
UMWELTMANAGEMENT  
REG. NR. 01-100-100023



ISO 9001:2015



ISO 13485

Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

schülke Suisse  
Schülke & Mayr AG  
Hungerbühlstrasse 22  
8500 Frauenfeld  
Schweiz  
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

schülke siège principal  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Allemagne  
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)