

schülke -†



thermodent® alka clean est un nettoyant liquide alcalin (concentré) contenant des tensio-actifs pour le traitement automatique des instruments et accessoires médicaux.

thermodent® alka clean

Notre plus

- Nettoyant alcalin doux pour instruments
- respecte le matériel
- convient à l'aluminium
- puissance de nettoyage particulièrement bonne

Domaines d'utilisation

thermodent® alka clean convient au nettoyage d'instruments dentaires, d'instruments MIC, de récipients, de plateaux, de pièces à main et de contre-angles. thermodent® alka clean s'utilise dans les convoyeurs et les machines simples.

Conseils d'utilisation

L'utilisation d'eau déminéralisée avec adjonction de thermodent® clear dans la phase de rinçage final améliore le résultat du rinçage. Après l'étape de nettoyage, il est recommandé de rincer avec thermodent® neutralizer afin d'empêcher l'entraînement des restes alcalins.

Concentration d'application:

thermodent® alka clean se dose comme suit:
recommandation standard 0,5 % (5 ml/l). Selon le degré d'encrassement 0,3 - 1 % (3 - 10 ml/l).
Le dosage se fait par le biais des pompes de dosage de la machine.

CE 0297



Données relatives au produit

Identification conformément aux dispositions du règlement (CE) 648/2004 : <5 % de tensioactifs non ioniques, < 5 % de tensioactifs anioniques, < 5 % de NTA et sels, < 5 % de polycarboxylate, enzymes.

Autres composants : agents de solubilisation, inhibiteurs de corrosion.

Données physico-chimiques

Couleur	pratiquement sans colore
Densité	env. 1,08 g/cm ³ / 20 °C / 1.013 hPa
pH	12 - 12,8 / 100 % / 20 °C
Point d'éclair	> 70 °C / Méthode : DIN 51755 Part 1
Routine FORM	liquide
Viscosité dynamique	env. 3 mPa*s / Méthode : ISO 3219

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
thermodent alka clean 5 l KA	1/jerrycan	147305

Accessoires

Accessoires	N° art.
Kanisterhahn für 5/ 10 l	135501
Kanisterschlüssel 5/ 10 l neutr.	135810

Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur la préparation thermodent[®] alka clean sur Internet sous www.schuelke.ch

Pour vos questions individuelles :

Customer Care

Tél. : +41 (0) 44 466 55 44

E-mail : mail.ch@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

schülke Suisse
Schülke & Mayr AG
Hungerbühlstrasse 22
8500 Frauenfeld
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com