

Solution prête à l'emploi à base d'alcool pour la désinfection des surfaces.

## perform<sup>®</sup> classic alcohol EP

### Notre plus

- rapide et efficace
- prêt à l'emploi
- sans colorant ni parfum
- Efficacité contrôlée suivant normes européennes

### Domaines d'utilisation

Pour la désinfection de surfaces dans les zones où l'efficacité microbologique rapide est exigée.

### Conseils d'utilisation

perform<sup>®</sup> classic alcohol EP est prêt l'emploi et s'utilise non dilué. Humecter complètement les surfaces, installations et appareils et laisser agir. Le produit sèche rapidement sur la surface traitée. Le cas échéant, retirer les quantités de produit en trop à l'aide d'une lingette jetable. Les surfaces particulièrement sensibles à l'alcool, comme le verre acrylique p. ex., ne peuvent pas être traitées avec ce produit.

### Efficacité microbologique

Efficacité	Solution	Temps d'action
<b>Bactéries</b> <i>EN1276, EN13697</i>	prêtes à l'emploi	1 min
<b>Fongique</b> <i>EN1650, EN13697</i>	prêtes à l'emploi	2 min
<b>activité virucide limitée</b> <i>Conformément à la directive de la DVV (Association allemande de lutte contre les maladies virales, association déclarée) / RKI</i>	prêtes à l'emploi	30 sec



## Données relatives au produit

### Composition :

100 g contiennent : 25 g d'éthanol (à 94 %), 35 g de propan-1-ol

### Données physico-chimiques

Couleur	incolore
Densité	0,890 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
pH	5,5 - 8,5 / 100 % / 20 °C
Point d'éclair	27 °C / Méthode : DIN 51755 Part 1
Routine FORM	liquide

## Remarques particulières

**Utilisez les désinfectants avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant utilisation.**

Ne pas utiliser à proximité de sources d'ignition.

L'utilisation de gants (par ex. en caoutchouc nitrile) est recommandée.

N° d'enregistrement BAuA : N-30996/ N-31007

Autorisation en Suisse : CHZN0736

## Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
perform classic alcohol EP 1 l FL	10/Carton	113908
perform classic alcohol EP 200 l FA	1/tonneaux	113910
perform classic alcohol EP 10 l KA	1/jerrycan	113909

## Accessoires

Accessoires	N° art.
Kanisterhahn für 5/ 10 l	135501
Kanisterschlüssel 5/ 10 l neutr.	135810

## Informations environnementales

Schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

## Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur la préparation perform<sup>®</sup> classic alcohol EP sur Internet sous [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)

Pour vos questions individuelles:

Customer Sales Service

Tél.: +41 (0) 44 466 55 44

E-mail: [mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

**schülke Suisse**  
Schülke & Mayr AG  
Sihlfeldstr. 58  
8003 Zürich, Suisse  
Tél +41 (0) 44 - 46655 - 44  
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

**schülke siège principal**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Allemagne  
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)