

schülke -+



Systèmes de distribution de lingettes humides pour l'utilisation de désinfectants de surface. Protection optimale contre la contamination grâce au concept safe & easy.

schülke wipes safe&easy

Notre plus

- Distributeur de lingettes humides (à jeter) innovant
- Plus de traitement nécessaire
- Élimination complète de tout le système bagless
- Protection contre la contamination grâce à la petite ouverture et à la protection anti-poussières supplémentaire
- Grande simplicité d'utilisation
- Produit médical

Domaines d'utilisation

Les lingettes schülke wipes safe&easy peuvent être imbibées de produits de désinfection choisis (prêt à l'emploi ou solution à la base d'un concentré). En fonction du choix des produits, les distributeurs de lingettes conviennent pour le nettoyage ou la désinfection de dispositifs médicaux non invasifs et/ou de surfaces de tous types. L'utilisation idéale sont les zones à risque particulièrement élevé de transmission de germes pathogènes, p. ex. des chambres d'isolation, la salle d'opération ou la néonatalogie. Leur utilisation est particulièrement avantageuse pour les surfaces à proximité du patient et les surfaces fréquemment touchées avec la main ou la peau.

safe & easy bag-in-box system - lingettes dans un sachet de protection à usage unique + seau solide pour un usage multiple

safe & easy bagless system - système complètement à usage unique pour les exigences d'hygiène les plus élevées

safe - parce que le risque de contamination des systèmes peut être significativement minimisé par l'utilisation unique

easy - parce que la manipulation est particulièrement facile



CE



schülke wipes safe&easy

Remarques particulières

Conseils d'utilisation

Remplissage dans de bonnes conditions d'hygiène

Veillez d'abord vous désinfecter les mains et mettre de nouveaux gants de protection et une blouse. Pendant la procédure de remplissage, veillez à ce que les gants ne soient pas contaminés par d'autres activités.

Ajoutez aux lingettes 2 litres de solution prête à l'emploi ou 3 litres (schülke wipes safe & easy bag-in-box système) resp. 2,5 litres (schülke wipes safe & easy bagless système) de solution obtenue à partir d'un concentré dilué. Imbiber les lingettes en travaillant lentement en spirale sur les serviettes.

Enfilez la lingette intérieure du rouleau dans l'ouverture en forme d'étoile du couvercle et revissez le couvercle. Les lingettes sont entièrement imbibées après 30 minutes au maximum et prêtes à l'emploi.

Documentez entretemps les noms des préparations, la concentration choisie, le temps d'exposition et la date de remplissage sur l'étiquette de scellement. Collez celle-ci sur le champ prévu.

Éliminer les saletés visibles avant la désinfection. Essuyer soigneusement les surfaces à désinfecter avec la lingette non tissée préimbibée et veiller au mouillage complet de la surface. Ne convient pas pour la désinfection de dispositifs médicaux invasifs. La durée d'utilisation est de 28 jours pour tous les produits schülke testés. Ne plus utiliser des lingettes desséchées. Bien refermer le couvercle après chaque retrait d'une lingette, afin d'éviter un dessèchement des lingettes. Consulter le mode d'emploi des produits de désinfection pour connaître les temps d'exposition et les recommandations particulières éventuelles concernant la sécurité de la conservation. Respecter les indications du fabricant des préparations de désinfection utilisées en ce qui concerne les temps d'exposition, les concentrations et les remarques concernant le spectre d'action.

Les plans d'utilisation en images pour ces systèmes (#2816 schülke wipes safe&easy bag-in-box; #900825 schülke wipes safe&easy bagless) peuvent être consultés et demandés via notre site internet www.schuelke.ch.

Regardez aussi nos vidéos de formation sur youtube sur notre "schuelke Channel".

Produits associés

- antifact® AF (N)
- antifact® extra
- buraton® rapid
- mikrozyd® AF liquid
- mikrozyd® sensitive liquid
- mikrozyd® universal liquid
- perform® advanced alcohol EP
- perform® classic alcohol EP
- perform® classic concentrate Q-Plus
- schülke wipes
- terralin® protect

Informations environnementales

schülke fabrique ses produits selon des procédés avancés, sécurisés et respectueux de l'environnement, de manière économique et dans le respect des standards élevés de qualité.

Avis d'expert et information

Pour avoir un aperçu des produits schülke wipes safe&easy, veuillez consulter l'adresse Internet www.schuelke.ch.

Pour des questions individuelles:

Customer Care

Tél.:+41 44 466 55 44

Email: mail.ch@schuelke.com

Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
schülke wipes s&e bagless 130 ST EM	6/Carton	70003177
schülke wipes safe+easy Disp. 10 PCS	1/Carton	119542
schülke wipes safe+easy 6x111 ST KT	1/Carton	119544
schülke wipes bagless system 6x130 ST KT	1/Carton	70000034



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

schülke Suisse
Schülke & Mayr AG
Hungerbühlstrasse 22
8500 Frauenfeld
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

schülke siège principal
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com