



Désinfection à l'oxygène actif des endoscopes flexibles dans le LDE.

## thermosept® PAA base

### Notre plus

- efficace contre les bactéries, les champignons, les virus et les spores (y compris spores de *Clostridium difficile*)
- bonne compatibilité avec les matériaux reposant sur un système de deux composants
- durée d'action courte à basse température

### Domaines d'utilisation

Pour la préparation mécanique, chimio-thermique des endoscopes flexibles dans les LDE. thermosept® PAA base / additive peut être utilisé dans les LDE appropriés prévus pour l'utilisation d'acide peracétique. Par exemple, dans les machines des fabricants BHT, Belimed, Olympus\*.

### Conseils d'utilisation

- **Dosage:** 1% (10ml/l) - 37°C ou 1,2% (12ml/l) - 35°C
- Doser si possible thermosept® PAA base et thermosept® PAA additive en même temps. Si le dosage simultané par les pompes doseuses LDE est impossible, doser d'abord thermosept® PAA base et immédiatement après thermosept® PAA additive. Veuillez respecter cet ordre compte tenu de la compatibilité des matériaux.
- La durée d'action est de 5 minutes.
- Les composants de désinfection sont adaptés au nettoyant enzymatique légèrement alcalin thermosept® EndoCleaner. Compatibilité confirmée microbiologiquement.



## Données relatives au produit

### Composition des composants base:

100g de solution contiennent: 5g d'acide peracétique, peroxyde d'hydrogène, acide acétique

### Composition des composants additifs:

100g de solution contiennent: hydroxyde de potassium, phosphate et inhibiteurs de corrosion

### Données physico-chimiques

Couleur	incolore
Densité	1,09 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
pH	< 1 / 100 % / 20 °C
Point d'éclair	Non applicable
Routine FORM	liquide
Viscosité dynamique	14,9 mPa*s / 20 °C

\* Machines ETD d'Olympus: thermosept® PAA peut être utilisé dans les machines Olympus miniETD 2 PAA, Olympus ETD 3 PAA, Olympus ETD 4 PAA. Le composant thermosept® PAA base est directement raccordé au dispositif d'aspiration de votre machine Olympus ETD par nos techniciens de service à l'aide d'un adaptateur spécial. L'adaptateur reste raccordé au dispositif d'aspiration même lorsque le produit est épuisé, mais il peut être facilement retiré à tout moment. Aucune modification sur la machine Olympus ETD n'est nécessaire. Le changement de produit se fait de la même manière que pour les bidons thermosept® EndoCleaner et thermosept® PAA additive. Pour ce faire, il suffit de visser ou de dévisser le bouchon à vis spécial relié à l'adaptateur par un tuyau sur le bidon du thermosept® PAA base. Voir illustrations. Pour toute question, n'hésitez pas à contacter votre conseiller commercial.

## Remarques particulières

Les composants base et additive ne peuvent être utilisés qu'ensemble.

Conserver dans le récipient d'origine à température ambiante. Garder le bidon hermétiquement fermé. Protéger de la chaleur et des rayons du soleil. thermosept® PAA ne convient pas aux instruments en laiton et en cuivre, ainsi qu'aux instruments chromés.

Selon la norme EN 17664, les spécifications du fabricant de l'instrument doivent être respectées et, si nécessaire, la compatibilité des matériaux doit être assurée avant l'utilisation.

Cela s'applique particulièrement à la préparation des endoscopes anciens. Ces derniers doivent impérativement être vérifiés quant à leur compatibilité avec l'acide peracétique.

Lire l'étiquette et les informations sur le produit avant utilisation.

## Comment commander

Article	Bon de livraison	N° art.
thermosept PAA base 5 l KA	2/Carton	125702
thermosept PAA base BHT Pin 5 l KA	2/Carton	70000882
thermosept PAA base Adapter 4 l KA	2/Carton	70002419
thermosept PAA base 200 l FA	1/tonneaux	70001117

## Informations environnementales

schülke fabrique ses produits selon des processus modernes, sûrs et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

## Avis d'expert et information

Vous trouverez un aperçu de toutes les expertises/textes portant sur la préparation thermosept® PAA base and additive sur Internet sous [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)



Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

schülke Suisse  
Schülke & Mayr AG  
Hungerbühlstrasse 22  
8500 Frauenfeld  
Schweiz  
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

schülke siège principal  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Allemagne  
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)