

schülke -†



Neutrální dezinfekční a čistící přípravek pro automatický chemotermický reprocessing konstrukcí postelí, nočních stolků, kontejnerů a operační obuvi

Čistí i
dezinfikuje

thermosept® NDR

Naše Plus

- Bez obsahu aldehydu
- Čistí a dezinfikuje v jednom kroku
- pH neutrální
- vyhovuje požadavkům pracovní skupiny "Dekontaminační systémy pro lůžka a vozíky" (AKBWA)
- Pro dezinfekci postelí, nočních stolů, kontejnerů a nádob
- Výborná materiálová kompatibilita

CE 0297

Oblast použití

thermosept®NDR je vhodný pro chemotermické čištění a dezinfekci rámu lůžek, transportních vozíků, kontejnerů, nočních stolků, operačních stolů, podnosů, klecí a všech dalších vodou omyvatelných zdravotnických pomůcek ve všech běžně dostupných automatických myčkách.

Účinnost

Baktericidní, levurocidní, omezeně virucidní
E. faecium, S. aureus (v souladu s požadavky německé směrnice na dekontaminaci postelí AK-BWA).
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití

Dávkování:

- **Doporučená koncentrace:** S parametry 1 % - 55 °C - 2 min baktericidní, omezeně virucidní, levurocidní

Produkt **thermosept®NDR** používejte výlučně v kombinaci s neutralizačním prostředkem **thermosept® BSK**, který slouží jako oplach a byl vyvinut pro kombinaci s **thermosept®NDR**. Jeho použitím eliminujeme výskyt nežádoucích skvrn po zaschnutí. Dávkování se provádí automaticky dle nastavení integrovaného dávkovacího čerpadla v mycím automatu nebo dezinfektoru. Vždy dodržujte instrukce výrobců zařízení a zdravotnických prostředků.



Složení

100 g thermoseptu® NDR obsahuje: 4 g dioctyldimethylammoniumchlorid; 3 g fenoxipropanol
Další složky: rozpouštědla, inhibitory koroze, stabilizátor tvrdosti, <5% neionogenních povrchově aktivních látek

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva	bezbarvý
Dynamická viskozita	Údaje nejsou k dispozici
Forma	kapalný
Hustota	cca. 1,00 g/cm ³ / 20 °C
pH	6 / 100 % / 20 °C
Zápalná teplota	> 100 °C / Metoda : ISO 2719

Zvláštní upozornění

Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu. Pouze pro profesionální použití.

Jakékoli vážné incidenty související s výrobkem je třeba hlásit výrobci a příslušnému úřadu. Vezměte prosím na vědomí doporučení výrobců strojů a zdravotnických prostředků. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. Chraňte před mrazem, horkem a slunečním zářením. Skladujte při pokojové teplotě v původním obalu.

Doba expirace: 36 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
thermosept NDR 20 I	1/Kanistr	144807

Související přípravky

- thermosept® BSK

Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Typ přípravku

Zdravotnický prostředek



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Distributor
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Výrobce
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com