

schülke -†



Koncentrovaný tekutý neutrální oplachový přípravek pro automatický chemickotermický reprocessing zdravotnického vybavení.

**Beze
šmouh**

thermosept® BSK

Naše Plus

- pH neutrální
- zabraňuje tvorbě skvrn po vysušení
- možné použití v systémech využívající přívod čisté vody i systému s nuceným oběhem vody
- nízká pěnovost
- vhodné na reprocessing postelí, skříněk, operačních stolů, kontejnerů atd
- vhodné i na předměty z anodizovaného hliníku
- urychluje sušení

Oblast použití

Používá se k oplachu po chemickotermické dezinfekci **thermoseptem® NDR**, a to na chirurgické nástroje, regály, přepravní vozíky, kontejnery, noční stolky, operačních stolů ve všech běžně dostupných automatických myčkách k rychlému vysoušení bez šmouh. Vyhovuje požadavkům AK-BWA

Návod na použití

Dávkování:

- chemickotermická příprava lůžek, van / kontejnerů 0,1-0,2 % (1 - 2 ml/l)
- oplach při termickém reprocessingu zdravotnických pomůcek 0,02 - 0,05 % (0,2 - 0,5ml/l)

Při použití **thermoseptu® BSK** v rámci chemickotermického reprocessingu použijte **thermosept®NDR** jako čisticí a dezinfekční složku,

Dávkování se provádí automaticky dle nastavení integrovaného dávkovacího čerpadla v mycím automatu nebo dezinfektoru. Vždy dodržujte instrukce výrobců zařízení a zdravotnických prostředků.

CE



Složení

15-30 % neionogenních tenzidů, rozpouštědla, korozní inhibitory, pH regulátory

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva	bezbarvý
Dynamická viskozita	Údaje nejsou k dispozici
Forma	kapalný
Hustota	cca. 0,99 g/cm ³ / 20 °C
pH	7 / 100 % / 20 °C
Zápalná teplota	37 °C / Metoda : DIN 51755 Part 1

Zvláštní upozornění

Skladujte při pokojové teplotě vpůvodím, těsně uzavřeném obalu. Chraňte před přímým slunečním světlem.

Doba expirace: 36 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
thermosept BSK 5 kg KA	1/Kartón	144906

Související přípravky

- thermosept® NDR

Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Typ přípravku

Zdravotnický prostředek třídy I.



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Distributor
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Výrobce
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com