

schülke -†



Tekutý přípravek na chemotermickou dezinfekci flexibilních endoskopů

Nízká pěnivost

thermosept® ED

Naše Plus

- Široké spektrum účinnosti
- Výborná materiálová kompatibilita
- Virucidní podle EN 14476, EN17111 a směrnice DWV/RKI
- sporicidní účinnost dle EN15883-4

CE 0297

Oblast použití

thermosept® ED je dezinfekční přípravek, pro chemotermický reprocessing flexibilních a rigidních endoskopů včetně endoskopického příslušenství a také pro termolabilní zdravotnické prostředky (např. anesteziologický materiál). Produkt je určen pro použití v automatických reprocesorech endoskopů (AER), mycích a dezinfekčních zařízeních (WD). Kompatibilita byla testována v rozsáhlých mikrobiologických a materiálových zkouškách - produkt je možné použít na endoskopy všech předních výrobců - Belimed, BHT, Getinge, Olympus, Steelco, Steris a Wassenburg. **thermosept®ED** doporučujeme používat v kombinaci pH neutrálním čističem **thermosept®ER**.

Účinnost

Baktericidní, mykobaktericidní, fungicidní, virucidní, sporicidní
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití

Dávkování:

1 % - (10 ml/l), 5 min při teplotě 55°C

Dávkování se provádí automaticky dle nastavení integrovaného dávkovacího čerpadla v mycím automatu nebo dezinfektoru. Vždy dodržujte instrukce výrobců zařízení a zdravotnických prostředků. Nemíchejte s jinými produkty. Produkt je kompatibilní i s čističem **thermosept®ER**



Složení

100 g roztoku obsahuje následující účinné látky: 20 g glutaraldehyd

Další složky: korozní inhibitory, rozpouštědla, komplexotvorné látky

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva	bezbarvý
Dynamická viskozita	cca. 3,2 mPa*s / 20 °C / Metoda : DIN 53019
Forma	kapalný
Hustota	cca. 1,04 g/cm ³ / 20 °C
pH	3,6 / 100 % / 20 °C
Zápalná teplota	63 °C / Metoda : DIN 51755 Part 1

Zvláštní upozornění

Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu. Pouze pro profesionální použití. Jakékoli vážné incidenty související s výrobkem je třeba hlásit výrobci a příslušnému úřadu. Vezměte prosím na vědomí doporučení výrobců strojů a endoskopů/přístrojů.

V závislosti na kvalitě vody se mohou na kovových částech endoskopů vyskytnout barevné změny. Funkce endoskopů není ovlivněna.

Nemíchejte s jinými produkty. Produkt je kompatibilní s thermosept® ER / thermosept® X-tra enzymatickým čističem. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. Chraňte před mrazem, horkem a slunečním zářením. Skladujte při pokojové teplotě v původním obalu.

Doba expirace: 36 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Thermosept ed 5 l	1/Kanistr	181001

Související přípravky

- thermosept® ER
- thermosept® X-tra

Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Typ přípravku

Zdravotnický přípravek



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Distributor
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Výrobce
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com