

schülke -†



Tekutý neutrální přípravek na čištění flexibilních endoskopů pro chemotermický reprocessing

Výborný
čisticí účinek

thermosept® ER

Naše Plus

- vhodné pro flexibilní endoskopy a chirurgické instrumentárium
- pH neutrální s vynikající materiálovou kompatibilitou
- obsahuje enzymy pro podporu čištění nečistot obsahujících bílkoviny

Oblast použití

thermosept® ER je tekutý čisticí prostředek ve formě koncentráту vhodný pro chemotermický reprocessing flexibilních endoskopů i endoskopických přístrojů, jako např. fibroskopy v kombinaci s **thermoseptem® ED** nebo **thermoseptem® PAA**. Použití je možné ve všech dostupných automatických myčkách Belimed, BHT, Getinge, Olympus, Steelco, Steris and Wassenburg

Návod na použití

Dávkování:

- 0,4 - 0,6% (4-6 ml/l), 5 - 10 min, při teplotě 30- 55°C

Flexibilní endoskopy a další endoskopická zařízení lze následně dezinfikovat pomocí produktu **thermosept® PAA**, případně produktem **thermosept® ED**. Všechny produkty obsahují inhibitory tvorby pěny a umožňují výběr mezi teplou nebo studenou vodou v jakékoliv fázi programového cyklu. Doporučujeme použití demineralizované vody.

Koncentrace, doba čištění a teplota jsou závislé na míře znečištění nástrojů. Dávkování se provádí automaticky dle nastavení integrovaného dávkovacího čerpadla vmycím automatu nebo dezinfektoru. Vždy dodržujte instrukce výrobců zařízení a zdravotnických prostředků.

CE



Složení

5 - 15 % neionogenních povrchově aktivních látek, enzymy

Další složky: rozpouštědla, korozní inhibitory,
Alkylpolyethylen-glycol-polybutylen-glycolether

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva	světležlutý
Forma	kapalný
Hustota	cca. 1,01 g/cm ³ / 20 °C
pH	6 - 7,5 / 100 % / 20 °C
Zápalná teplota	45 °C / Metoda: DIN 51755 Part 1

Zvláštní upozornění

Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu. Pouze pro profesionální použití. Jakékoli vážné incidenty související s výrobkem je třeba hlásit výrobci a příslušnému úřadu. Vezměte prosím na vědomí doporučení výrobců strojů a přístrojů. Uchovávejte nádobu těsně uzavřenou. Chraňte před mrazem, horkem a slunečním zářením. Skladujte při pokojové teplotě v původním obalu.

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Thermosept er čisticí enzym 5 l	1/Kanistr	189901
thermosept ER 5 l KA	1/Kanistr	70003422

Související přípravky

- thermosept® ED

Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Typ přípravku

Zdravotnický přípravek



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Distributor
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Výrobce
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com