

schülke -+



Tekutý bezalkoholový dezinfekční přípravek určený k rychlému čištění a dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků citlivých na alkohol.

Na citlivé
povrchy

desprej[®] sensitive

Naše Plus

- Šetrná dezinfekce
- Vhodný i na citlivé materiály
- Velmi rychlý účinek
- Ihned k použití
- Jemně parfemován příjemnou vůní

CE 1023

Oblast použití

desprej[®] sensitive je vhodný pro oblast zdravotnictví, ordinace lékařů, ústavy sociální péče, domácí péči a obecnou praxi. Vhodný na zdravotnické prostředky, přístroje a pomůcky z plastů a plexiskel (inkubátory, displaye, UZV sondy, klávesnice, monitory atd.). Výborný pro ošetření špatně dostupných míst a všude tam, kde je nutno zajistit rychlý dezinfekční efekt. Vhodný i do systému suchých utěrek schülke wipes.

Účinnost

Baktericidní, levurocidní, virucidní (BVDV/Vaccinia/MVA), mykobaktericidní.

Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití

Předem odstraňte hrubé nečistoty. Aplikujte přípravek postříkáním tak, aby byl povrch rovnoměrně a zcela smočen. Nechejte přípravek účinkovat po dobu požadované mikrobiologické účinnosti. Poté přebytečnou vlhkost setřete jednorázovou utěrkou.

Lesklé povrchy a povrchy obrazovek setřete po době expozice dosucha čistou a suchou jednorázovou utěrkou. Při ošetřování zdravotnických prostředků dbejte na pokyny výrobce. Není určen pro dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků.



Složení

100 g přípravku **desprej[®] sensitive** obsahuje následující aktivní látky:

- 0,02 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
- 0,05 g Poly(hexametylenbiguanid) hydrochlorid
- 0,05 g Didecylidimethylamonium chlorid

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva	bezbarvý
Dynamická viskozita	nestanoveno
Forma	Kapalina
Hustota	1,01 - 1,03 g/cm ³ / 20 °C
pH	7,5 - 8,5 / 100 % / 20 °C
Zápalná teplota	> 95 °C / Metoda : Vypočtená hodnota



Zvláštní upozornění

Pouze pro profesionální trh. Nevhodný na materiály ze silikonu, barevných kovů (měď, mosaz, hliník, zinek), gumy, měkčeného PVC a polyamidu.

Doba expirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Desprej sensitive 500 ml	20/Karton	70000072
Desprej sensitive 5 kg	1/Kanistr	70000073

Životní prostředí

Společnost schulke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality. Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.

Typ přípravku

Zdravotnický prostředek



Společnost Schulke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Výrobce
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com