

schülke →



Dezinfekční ubrousky, s nízkým obsahem alkoholu, určené k dezinfekci malých ploch a povrchů. Vysoká kompatibilita s materiály

Rychlá dezinfekce
citlivých povrchů

mikrozid® universal wipes

Naše Plus

- Výborná materiálová kompatibilita
- Rychlá účinnost (norovirus do 30 sekund)
- Účinný podle EN 16615 za 1 minutu
- Dermatologicky testován
- Vysoká kvalita utěrek o rozměrech 20x20 cm
- Výborné čistící účinky

Oblast použití

Rychlá dezinfekce malých ploch a povrchů na bázi alkoholu použitelná na všechny druhy otíratelných materiálů se zvýšeným rizikem infekce především tam, kde je vyžadována rychlá účinnost a dobrá kompatibilita s materiály, např.:

- Povrchy v okolí pacienta
- Léčebná zařízení
- Operační stoly a příslušenství
- Inkubátory
- Povrchy zdravotnických pomůcek
- Displeje, dotykové obrazovky a ovládací panely
- Nábytek a koženkové čalounění
- Citlivé povrchy

Účinnost

Baktericidní, levurocidní, virucidní (Adeno, Noro, Rota, Polyoma SV 40, obalené viry - HBV, HCV, HIV)
Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití

Před použitím dezinfekčních utěrek odstraňte z povrchu veškeré hrubé nečistoty. Navlhčenou utěrkou poté otřete povrch určený k dezinfekci. Ujistěte se, že balení je po

vytažení potřebného počtu utěrek opět uzavřené. Výrobce garantuje účinnost produktu měsíc po otevření balení.



CE 0297



mikrozyd® universal wipes

Složení

Balení obsahuje 100 utěrek napuštěných roztokem.
100 g dezinfekčního roztoku obsahuje následující aktivní látky:

- 17,4 g Propan-2-ol
- 12,6 g Ethanol

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva	bezbarvý
Dynamická viskozita	Údaje nejsou k dispozici
Forma	Vodný alkohol obsahující roztok na netkaná textilie
Hustota	cca. 0,95 g/cm ³ / aktivního roztoku
pH	cca. 3,5 / 100 % / aktivního roztoku
Zápalná teplota	26 °C / Metoda: DIN 51755 Part 1 / aktivního roztoku



Zvláštní upozornění

Používejte dezinfekční přípravek bezpečně. Před použitím si prosím přečtěte etiketu. Výrobek je kompatibilní také s kovy a syntetickými materiály. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Elektrické přístroje použijte po dokonalém zaschnutí a odpaření dezinfekčního roztoku. Zákaz kouření. Skladovat v uzavřených obalech, mimo zdrojů sálavého tepla, ohně, nápojů, krmiv, potravin a slunečního záření. Teplota skladování: +15 až +25 °C. Velikost dezinfikované plochy je ovlivněna teplotou a povrchem dezinfikovaného materiálu. Po každém vytažení utěrky je nutné balení důkladně uzavřít.

Doba expirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
mikrozyd universal wipes premium 100ks	6/Karton	70000038

Související přípravky

- mikrozyd® AF wipes
- mikrozyd® PAA wipes
- mikrozyd® sensitive wipes

Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Typ přípravku

Zdravotnický prostředek, Biocid



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Distributor
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Výrobce
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com