

Reinigung und Desinfektion leicht gemacht

Wandspender sm 2 universal / sm 2 500 / KHK / KHL

Schritt 1

Entnehmen Sie die Produktflasche aus dem Wandspender. Die glatten und polierten Oberflächen ermöglichen eine leichte Reinigung sowie die Desinfektion z.B. mit perform® bzw. mikrozid® universal wipes.



Schritt 2

Setzen Sie eine Flasche ein und pumpen Sie 20 Hübe des Desinfektionsmittels in einen Becher.

 5 Minuten einwirken lassen



Schritt 3

Entnehmen Sie nach der Einwirkzeit nun die Flasche

und pumpen Sie, bis der Schlauch leer ist. Fangen Sie die Flüssigkeit wieder in dem Becher auf.



Schritt 4

Wischen Sie den Schlauch mit einem trockenen Tuch ab, um Rückstände zu entfernen.



Schritt 5

Setzen Sie eine Flasche des gewünschten Produkts ein und pumpen Sie 20 Hübe in einen Becher. Der Inhalt des Bechers kann anschließend ins Abwasser entsorgt werden.



Schritt 6

Danach ist der Spender für den nächsten Einsatz bereit.



Folgende Produkte wurden für die qualitätsgesicherte Aufbereitung der sm 2 universal / sm 2 500 / KHK / KHL Spender getestet:

mikrozid® AF liquid, perform®, buraton® rapid, antifact® N liquid, terralin® liquid sowie mikrozid® AF wipes und mikrozid® universal wipes.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.