



Alkoholische 70 % (v/v) IPA-Gebrauchslösung zur Desinfektion von Flächen.

perform® classic alcohol IPA

Unser Plus

- schnell, effektiv und rückstandsfrei
- gebrauchsfertig
- farbstoff- und parfümfrei
- Wirksamkeit geprüft nach Europäischen Normen (EN)

Anwendungsgebiete

Zur Desinfektion von Flächen in Bereichen, in denen eine schnelle mikrobiologische Wirksamkeit gefordert ist.

Anwendungshinweise

perform® classic alcohol IPA unverdünnt auf Gegenstände und Flächen ausbringen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten. Das Produkt trocknet schnell von der Oberfläche ab. Ausbringung maximal 50 ml/m². Besonders alkoholempfindliche Flächen, wie z.B. Acrylglas, dürfen nicht behandelt werden.

Mikrobiologische Wirksamkeit

| Wirksamkeit | Konzentration | Einwirkzeit |
|---|-----------------|-------------|
| bakterizid <i>EN1276, EN13697</i> | gebrauchsfertig | 1 Min. |
| levurozid <i>EN1650, EN13697</i> | gebrauchsfertig | 1 Min. |
| begrenzt viruzid <i>gemäß DVV-/RKI-Leitlinie</i> | gebrauchsfertig | 30 Sek. |



Produktdaten

Zusammensetzung:
100 g Lösung enthalten folgende Wirkstoffe: 63,1 g Propan-2-ol (entspricht 70 % (v/v)).

Chemisch-physikalische Daten

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Dichte | ca. 0,88 g/cm ³ / 20 °C |
| Farbe | farblos |
| Flammpunkt | 22 °C / Methode: DIN 51755 Part 1 |
| Form | flüssig |
| pH | Nicht anwendbar |
| Viskosität, dynamisch | > 2,5 mPa*s / 20 °C / Rohstoff |

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

EU-0023656-0001 1-1

Bestellinformation

| Artikel | Lieferform | Art.-Nr. |
|--|------------|----------|
| perform [®] classic alcohol IPA 1 L FL | 10/Karton | 70000029 |
| perform cl. alc IPA EN/IT/E 1 l FL | 10/Karton | 70003139 |
| perform [®] classic alcohol IPA 10 L KA | 1/Kanister | 70000030 |

Anwendungshilfen

| Anwendungshilfen | Art.-Nr. |
|-------------------------------------|----------|
| Druckluftspritze | 120001 |
| Kanisterschlüssel für 5 + 10 l | 135810 |
| schülke Kanisterhahn für 5 l / 10 l | 135501 |
| Sprühkopf für 1l-Flasche | 180212 |
| Umfülltrichter | 117901 |

Verwandte Produkte

- perform[®] classic mix dry wipes

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.

Für individuelle Fragen:

Application Department

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt
Deutschland
Tel. +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com