



Vochtige doekjes afgiftesysteem voor gebruik van schülke oppervlakken ontsmettingsmiddelen op alle toepassingsgebieden van ziekenhuizen, verpleeghuizen, huisartspraktijken en hulpdiensten.

schülke wipes

Onze pluspunten

- breed en eenvoudig toepasbaar
- gebruiksooplossing bruikbaar tot 28 dagen
- niet pluizende doekjes
- 40, 70, 100 of 111 doekjes per rol

Toepassingsgebied

Vochtige doekjes doseersysteem voor gebruik in combinatie met schülke oppervlakkenontsmettingsmiddelen. Schülke doekjes kunnen worden gebruikt voor het desinfecteren en reinigen van oppervlakken van niet-invasieve medische hulpmiddelen en alle ondergronden. Wij bieden de volgende artikelen:

- schülke wipes 40 (30 x 30 cm)
- schülke wipes 100 (30 x 30 cm)
- schülke wipes 70 (28 x 23 cm)
- schülke wipes 111 (30 x 24 cm)

Gebruiksaanwijzing

Het vullen onder hygiënische omstandigheden

Desinfecteer eerst de handen en draag nieuwe beschermende handschoenen en jas. Zorg ervoor dat tijdens het vullen, de handschoenen niet zijn verontreinigd door andere activiteiten. Open de deksel van de dispenser en plaats de uitgekakte fleec rol. Trek het binnenste doekje een beetje uit het midden van de rol. Schenk dan 2 liter kant-en-klaar product of 3 liter verdund-concentraat-oplossing in één keer langzaam in een spiraalvorm over de rol (schülke doekjes 40/70 stuks = 1,5 liter). Gebruik alleen producten en concentraties aanbevolen door schülke (zie betreffende product informatie). Trek het binnenste doekje van de rol door de stervormige afgeefopening van de deksel en plaats de deksel stevig op de dispenser. Na 30 minuten zijn de doekjes volledig verzadigd en klaar voor gebruik. Documenteer in de tussentijd, zoals met elke hervulling de

naam van het gekozen product, concentratie, inwerktijd en de datum van het vulmoment op het etiket. Dit etiket wordt geleverd bij elke schülke fleec rol. Plak dit etiket op het daarvoor bestemde veld op het doseersysteem. Voor medische producten en oppervlakken die gevoelig zijn voor alcohol (bijvoorbeeld pads, displays, acrylglas, ultrasound transducers) adviseren wij onze mikrozid® sensitive liquid en/of terralin® protect. Verwijder zichtbare verontreiniging voorafgaand aan de desinfectie. Veeg oppervlakken grondig af met een doorweekt doekje. Zorg dat u het oppervlak volledig nat houdt gedurende de hele inwerktijd, gebruik geen uitgedroogde doekjes. Volg instructies van de fabricant van desinfectiemiddelen t.a.v. reactietijd, inzetconcentratie, toepasbaarheid en overige. De herbruikbare systemen zijn ongeschikt voor toepassing in risicogebieden. Wij adviseren voor risicogebieden onze schülke doekjes Safe and Easy bag-in-box / schülke wipes zakloos. Het gebruikte ontsmettingsmiddel moet ook worden gecontroleerd met betrekking tot het al dan niet geschikt zijn voor gebruik in risicogebieden.

Reiniging en desinfectie

Zorg ervoor dat de behandelde oppervlakken volledig bevochtigd zijn bij gebruik van de doordrenkte doekjes. Zorg dat de dispenser opening goed wordt afgesloten na gebruik van de doekjes teneinde uitdroging te voorkomen

Hervullen onder hygiënische omstandigheden

De dispenser moet gereinigd en gedesinfecteerd worden alvorens een nieuwe fleecerol wordt geplaatst. Een gedetailleerde instructie leaflet kan worden gedownload via www.schuelke-wipes.com

CE 0297



schülke wipes

Speciaal advies

De vervaldatum voor alle schülke producten is na 28 dagen, met uitzondering van terralin® PAA. Terralin® PAA kan alleen gebruikt worden in combinatie met de schülke wipes 40. De houdbaarheidsduur is 12 uur. Nadere informatie kunt u vinden in onze folder.

Bestelinformatie

Artikel	Eenheid	Artikel nr.
schülke wipes 70 ST RO	6/Doos	70003345
schülke wipes 100 ST RO	6/Doos	70003346
schülke wipes 111 ST RO	6/Doos	70003347
schülke wipes Feuchttuchsp. 1 ST EM	5/Doos	70003212
schülke wipes 40 ST RO	10/Doos	70003344

Accessoires

Accessoires	Artikel nr.
schülke wipes Box Wandhalterung 1 ST	134435
Wandhalterung VA schülke wipes	134430

Verwante producten

- mikrozyd® AF liquid
- mikrozyd® sensitive liquid
- terralin® liquid
- terralin® PAA
- terralin® protect

Milieu

schülke producten worden vervaardigd onder vooruitstrevende, veilige, spaarzame en milieuvriendelijke omstandigheden. Wij hanteren hoge kwaliteitseisen.

Expert reports en informatie

Een overzicht van alle rapporten en literatuur betreffende de schülke wipes is terug te vinden op internet via website www.schuelke.nl

Gebruik biociden veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie. Zie veiligheidsinformatieblad voor gevaren-en veiligheidsadvies.

Voor individuele vragen kunt u zich wenden tot ons Benelux kantoor: 0031(0)23 535 26 34 of internationaal 0049(0)40 521 00 666. E-mail: info@schuelke.com of salesbenelux@schuelke.com.



Schülke & Mayr GmbH bezit een fabrikanten autorisatie conform sectie 13 paragraaf 1 van de Duitse Medicijnwet en certificaten van GMP compliance voor medische producten.

schülke Benelux
Schülke & Mayr Benelux B.V.
Oudeweg 8d
2013 CC Haarlem, Nederland
Tel: +31 (0) 23 535 26 34
Fax: +31 (0) 23 536 79 70
www.schuelke.nl
salesbenelux@schuelke.com

schülke hoofdkantoor
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Duitsland
Tel: +49 40 - 52100 - 0
Fax: +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com