



System chusteczek przeznaczonych do nasączenia środkami dezynfekcyjnymi firmy schülke

## schülke wipes

### Zalety

- łatwe w użyciu
- po zalaniu do wykorzystania w ciągu 28 dni
- nie pozostawiają smug
- gramatura 50 g/cm<sup>3</sup>
- wykonane z poliestru
- dostępne w ilości 100 szt. chusteczek (30x30cm) lub 111 szt. chusteczek (30x24cm) w rolce
- pojemniki wielokrotnego użytku do chusteczek wykonane z polipropylenu wyposażone w system dozujący
- możliwość mycia i dezynfekcji pojemników w temp. do 70°C (również w myjniach dezynfektorach)

### Obszary zastosowania

Chusteczki przeznaczone są do nasączenia preparatem dezynfekującym. W zależności od środka użytego do nasączenia (produkt biobójczy czy wyrób medyczny), chusteczki przeznaczone są do dezynfekcji powierzchni lub do dezynfekcji wyrobów medycznych w obszarach, w których dezynfekcja wymagana jest ze względów sanitarno-higienicznych.

### Wskazówki dotyczące stosowania

Przy nasączeniu chusteczek zalecane jest stosowanie rękawic ochronnych oraz zdezynfekowanie blatów roboczych. Umieścić rolkę w pojemniku, napełnić pojemnik 3 litrami roztworu roboczego środka dezynfekcyjnego. Po odczekaniu 30 minut chusteczki są całkowicie nasączone i gotowe do użycia.

Wypełnij etykietę, która jest dołączona do każdej rolki chusteczek i naklej na pojemniku. Zmieniaj etykietę przy każdym ponownym napełnianiu systemu.



# schulke wipes

## Wskazówki szczególne

Używając nasączanych chusteczek należy zwrócić uwagę aby dezynfekowane powierzchnie pozostawały zwilżone przez wymagany czas. Po użyciu należy szczelnie zamknąć opakowanie, aby zapobiec wysychaniu chusteczek.

## Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
schulke wipes 100 ST RO	6/Karton	70003346
schulke wipes 111 ST RO	6/Karton	70003347
schulke wipes 100/111 Spend.box 1 ST EM	5/Karton	70003210
schulke wipes 6x100 ST KT	1/Karton	119503
schulke wipes 6x111ST KT	1/Karton	119506
schulke wipes 100/111 dozownik 1ST	1/Karton	119541



Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

**Dystrybutor**  
Schulke Polska Sp. z o. o.  
Al. Jerozolimskie 132  
02-305 Warszawa, Polska  
Telefon +48 0 22 11-60-700  
Telefax +48 0 22 11-60-701  
www.schulke.pl  
schulke.polska@schulke.pl

**Wytwórca**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt, Niemcy  
Telefon +49 40 - 52100 - 0  
+49 40 - 52100 - 318  
www.schuelke.com  
info@schuelke.com