



Do nawilżania, oczyszczania i dekontaminacji przedsionków nosa

octenisan® md nasal gel żel

Zalety

- dekontaminacja przedsionków nosa
- nawilżanie
- oczyszczanie
- zawiera oktenidynę

Obszary zastosowania

Żel do nosa octenisan® md nasal gel służy do nawilżania, oczyszczania i dekontaminacji przedsionków nosa, poprzez czyszczenie fizyczne oraz do wspomagania leczenia ran w przypadku uszkodzeń nabłonka nosa. Zapewnia odpowiednią wilgotność przedsionków nosa i zapobiega podrażnieniom. Jest szczególnie przydatny na oddziałach intensywnej opieki medycznej, oddziałach zakaźnych, przed planowanymi zabiegami operacyjnymi.

Wskazówki dotyczące stosowania

O ile lekarz nie zalecił inaczej, wyrób medyczny octenisan® md nasal gel należy stosować maksymalnie dwa razy na dobę przez 5 dni. Wyrób medyczny octenisan® md nasal gel jest przeznaczony wyłącznie do stosowania w przedsionkach nosa. Odpowiednią ilość żelu wprowadzić do przedniej części nosa (przedsionków nosa) na przykład za pomocą patyczka kosmetycznego, następnie zamknąć nos poprzez boczne ściśnięcie skrzydeł nosa. Masować między kciukiem a palcem wskazującym - dzięki temu zagwarantowane jest równomierne rozprowadzenie żelu w przedsionkach nosa. W razie potrzeby należy najpierw dokładnie wyczyścić nos za pomocą wilgotnego wacika. Nadmiar żelu usunąć wacikiem. Należy przy tym uważać, aby pozostawić w przedsionkach nosa warstwę żelu. W celu zapobiegnięcia przeniesienia zarazków należy unikać bezpośredniego kontaktu z końcówką otwartej tuby.



octenisan[®] md nasal gel żel

Dane produktu

Skład: Woda oczyszczona, glikol propylenowy, hydroksyetyloceluloza, dichlorowodorek oktenidyny.

Dane chemiczno-fizyczne

Forma	lepka ciecz
Gęstość	ok. 1,01 g/cm ³ / 20 °C
Kolor	niemal bezbarwny
pH	6,9 / 100 % / 20 °C
Tarcie, dynamiczne	ok. 5.050 mPa*s
Temperatura zapłonu	> 100 °C

Wskazówki szczególne

Żelu do nosa octenisan[®] md nasal gel nie stosować w przypadku potwierdzonego uczulenia na którykolwiek ze składników. Nie stosować w połączeniu z oczyszczającymi mydłami, maściami, olejkami, enzymami itp., ponieważ mogą one wchodzić w reakcję z konserwantem. Nie stosować jednocześnie z produktami zawierającymi PVP-jod, ponieważ może to prowadzić do powstawania przebarwień i ograniczenia działania antyseptycznego PVP-jodu. Aby zapobiec możliwym uszkodzeniom tkanki, nie należy stosować octenisan[®] md nasal gel na chrząstkę, do uszu oraz do oczu. Nie wprowadzać produktu do jamy nosowej. Tylko do użytku zewnętrznego. Nie stosować do infuzji ani do wstrzyknięć. Nie spożywać. Nie stosować u dzieci poniżej 1 roku życia. Tubkę z żelem należy przechowywać w temperaturze pokojowej i chronić przed bezpośrednim dostępem promieni słonecznych. Przechowywać w miejscu niwidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować w przypadku widocznych uszkodzeń pojemnika. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Termin ważności: 2 lata

Termin ważności po pierwszym otwarciu tuby: 6 miesięcy

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
octenisan md Nasengel EN/PL/PT 6 ml TB	20/Karton	70002424
octenisan md Nasengel EN/PL 6 ml TB	20/Karton	70003046

Informacje dotyczące ochrony środowiska

Firma Schulke & Mayr produkuje preparaty z wykorzystaniem metod ekonomicznych, zaawansowanych technologicznie i przyjaznych dla środowiska przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.

Badania i informacje

Wyrób medyczny



GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG. NR. D-150-10023



Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

Wytwórca:
Schulke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 40 - 52100 - 0
+49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com

Dystrybutor:
Schulke Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11-60-700
Telefax +48 22 11-60-701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com