

schülke →



Tekutý prípravok na čistenie, dezinfekciu a starostlivosť o odsávacie systémy v zubnej praxi. Používajte denne 1-2 krát.

Nepení

aspirmatic®

Naše Plus

- Možno použiť vo všetkých zubárskych vybaveniach (napr. Sironna, KaVo, Castellini atď.)
- Pre všetky druhy odlučovačov amalgámu (napr. Dürr, Metasys)
- Nepenivý

Oblasti použitia

aspirmatic® sa používa na každodenné čistenie, dezinfekciu a starostlivosť o všetky odsávací systémy a separátory amalgánu.

Účinnosť

Baktericídny, levurocídny, virucídny na obalené vírusy
Pre získanie viac informácií o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktu zástupcu spoločnosti Schülke

Návod na použitie

Použite aspirmatic® v 2% roztoku na poludnie a na konci dňa na čistiacu dezinfekciu. Použite 2 l roztoku aspirmatic® na použitie pre každú súpravu zubného systému a použite v kombinácii s dentálnym aplikačným zariadením Schülke. Na prípravu 2 l roztoku použite pridajte 40 ml aspirmaticu® do 1960 ml studenej vody. Produkt zriedte studenou vodou, aby ste dosiahli požadovanú aplikačnú koncentráciu. Nasajte 1 1/2 litra používaného roztoku cez sacie hadice a zvyšnú 1/2 litra nalejte do oplachovej vane. Nechajte namočiť minimálne 60 minút alebo cez noc. Odporúčame použiť aspirmatic® cleaner 1-2 týždenne namiesto aspirmatic®.

CE 0279



Zloženie

100 g aspirmatic® obsahuje:

- 7,5 g dioctyl dimetyl ammonium chloride

Ďalšie zložky: neionogénne tenzidy, mydlo, vôňa, inhibítory korózie

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Bod vzplanutia	Nepoužiteľné
Dynamická viskozita	Údaje sú nedostupné
Farba	modrý
Forma	kvapalina
Hustota	cca. 0,99 g/cm ³ / 20 °C
pH	6,5 - 7,5 / 100 % / 20 °C



Zvláštne upozornenia

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte. UVV (predpisy prevencie úrazov) vyžadujú, aby osoby pracujúce s dezinfekčnými prostriedkami, ktoré nie sú určené na pokožku, nosili rukavice. Nepoužívajte po dátume expirácie. Nemiešajte koncentrát ani roztok prípravku aspirmatic® a aspirmatic® cleaner.

Doba expirácie: 3 roky

Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
Aspirmatic 2 l	5/Kartón	150113
aspirmatic -EU-O- 2 l FL	5/Kartón	70003401

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke svoje produkty vyrába inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržanie vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku

Zdravotnícky prostriedok



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com