

schülke →



Neutrálny dezinfekčný a čistiaci prípravok pre automatický chemotermický reprocessing konštrukcie postelí, nočných stolíkov, kontajnerov a operačnej obuvi

Čistí a
dezinfikuje

thermosept® NDR

Naše Plus

- Bez obsahu aldehydu
- Čistí a dezinfikuje v jednom kroku
- pH neutrálne
- Vyhovuje požiadavkám pracovnej skupiny "Dekontaminačné systémy pre lôžka a vozíky" (AKBWA)
- Na dezinfekciu postelí, nočných stolíkov, kontajnerov a nádob
- Výborná materiálová kompatibilita

Oblasti použitia

thermosept®NDR je vhodný k chemotermickému čisteniu a dezinfekcii rámov lôžok, transportných vozíkov, kontajnerov, nočných stolíkov, operačných stolov, podnosov, klieťok a všetkých ďalších vodou umývateľných zdravotníckych pomôcok vo všetkých bežne dostupných automatických umývačkách.

Účinnosť

Baktericídny, levurocídny, obmedzene virucídny E. faecium, S. aureus (v súlade s požiadavkami nemeckej smernice na dekontamináciu postelí AK-BWA).

Pre získanie viac informácií o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Návod na použitie

Dávkovanie:

Odporúčaná koncentrácia: S parametrami 1% - 55 °C - 2 min baktericídne, obmedzene virucídne, levurocídne

Produkt **thermosept®NDR** používajte výlučne v kombinácii s neutralizačným prostriedkom **thermosept® BSK**, ktorý slúži ako oplach a bol vyvinutý pre kombináciu s **thermosept®NDR**. Jeho použitím eliminujeme výskyt nežiaducich škvŕn po zaschnutí. Dávkovanie sa vykonáva automaticky podľa nastavenia integrovaného dávkovacieho čerpadla v

umývacom automate alebo dezinfektore. Vždy dodržujte inštrukcie výrobcov zariadení a zdravotníckych pomôcok.

CE 0297



Zloženie

100 g thermoseptu® NDR obsahuje: 4 g dioctyldimethylammoniumchlorid; 3 g fenoxipropanol
Ďalšie zložky: rozpúšťadlá, inhibítory korózie, stabilizátor tvrdosti, <5% neionogénnych povrchovo aktívnych látok

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Bod vzplanutia	> 100 °C / Metóda : ISO 2719
Dynamická viskozita	Údaje sú nedostupné
Farba	bezfarebný
Forma	kvapalina
Hustota	cca. 1,00 g/cm ³ / 20 °C
pH	6 / 100 % / 20 °C

Zvláštne upozornenia

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o produkte. Len na profesionálne použitie. Akékoľvek vážne incidenty súvisiace s výrobkom treba hlásiť výrobcovi a príslušnému úradu. Vezmite prosím na vedomie odporúčania výrobcov strojov a zdravotníckych pomôcok. Uchovávajte nádobu tesne uzavretú. Chráňte pred mrazom, horúčavou a slnečným žiarením. Skladujte pri izbovej teplote v pôvodnom obale.

Doba expirácie: 36 mesiacov

Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
thermosept NDR 20 I	1/Kanister	144807

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke svoje produkty vyrába inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržanie vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku

Zdravotnícky prostriedok



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com