

schülke -t



Tekutý dezinfekčný a dekalčifikačný prípravok na báze aktívneho kyslíka určený pre dialyzačné jednotky a systémy vodných okruhov.

Na dialýzy

dialox™

Naše Plus

- Dezinfekcia, čistenie a dekalčifikácia v jednom kroku
- Účinnosť pri nízkych teplotách
- Prevencia tvorby biofilmov vo vnútorných okruhoch
- Výborná materiálová kompatibilita
- Viac ako 20 rokov skúseností v dialyzačných prevádzkach

Oblasti použitia

dialox® je určený pre:

- pravidelnú chemickú dezinfekciu a dekalčifikáciu dialyzačných jednotiek a systémov vodných okruhov
- rýchlu dezinfekciu dialyzačných jednotiek medzi jednotlivými pacientmi
- dezinfekciu hydrauliky, okruhov a generátorov dialyzačných jednotiek pri odstavení alebo pozastavení dialyzačnej jednotky
- zabránenie rastu biofilmu vo vnútorných okruhoch

Účinnosť

Baktericídny, virucídny, mykobakteriocídny, tuberkulocídny, fungicídny.

Pre získanie viac informácií o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Návod na použitie

dialox® je určený na priame použitie. Dávkovanie si zabezpečuje automaticky dialyzačný prístroj podľa odporúčaní výrobcu dialyzačnej jednotky. Postupujte podľa návodu na použitie uvedeného na obale. Reziiduálnu kontrolu vykonávajte pomocou testovacích prúžkov podľa operačného manuálu dialyzačnej jednotky.

CE 0297



Zloženie

100 g dialox® obsahuje nasledujúce aktívne látky:

- 6,9 g peroxid vodíka
- 3,6 g kyselina octová
- 0,4 g kyselina peroctová

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Bod vzplanutia	Nepoužiteľné
Dynamická viskozita	neurčené
Farba	bezfarebný
Forma	kvapalina
Hustota	1,03 g/cm ³ / 20 °C
pH	1,4 / 100 % / 20 °C

Zvláštne upozornenia

Určené pre profesionálny trh. Nemiešajte dialox® s inými výrobkami, predovšetkým s aldehydovými alebo halogénovými derivátmi. Pri práci s prípravkom používajte ochranné pracovné pomôcky a zaistite dostatočné vetranie. Doba expirácia: 24 mesiacov

Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
Dialox 5 l	1/Kanister	104104

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke svoje produkty vyrába inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržanie vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku

Zdravotnícky prostriedok



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
Bioxal SA
Route des Verennes 71100
Chalon Sur Saone
France