

schülke -†



Tekutý dezinfekčný prípravok na báze kombinovaného účinku alkoholov vhodný k rýchlej dezinfekcii malých plôch a povrchov zdravotníckych prostriedkov.

Rýchly
účinnok

mikroqid[®] AF liquid

Naše Plus

- Okamžite k použitiu
- Zaručuje rýchly dezinfekčný efekt
- Vhodný k dezinfekcii zle dostupných miest
- Dobrá materiálová znášanlivosť
- Nezanecháva šmuhy

Oblasti použitia

Mikroqid AF liquid sa odporúča k rýchlej dezinfekcii malých plôch a povrchov zdravotníckych prostriedkov (stoly, vozíky, kľučky, dvere, pomôcky atď.). Vhodný na lesklé povrchy a oblasti so zvýšeným infekčným rizikom. Prípravok je vhodný tam, kde je potrebná rýchla a účinná dezinfekcia zdravotníckych pomôcok ako napr.:

- Povrchy v blízkosti pacientov
- Kontaktné plochy
- Ordinácie
- Operačné stoly a okolité povrchy
- Zdravotnícke prostriedky

Účinnosť

Baktericídny, virucídny, mykobaktericídny, fungicídny.
Pre bližšie informácie o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Návod na použitie

Mikroqid AF liquid sa neriedi a aplikuje sa koncentrovanej pomocou nástreku prípadne náteru. Povrch dôkladne namočte roztokom a nechajte pôsobiť po dobu 1 minúty prípadne prebytočné množstvo tekutiny utrite po uplynutí doby expozície jednorazovou utierkou.

CE 0297



mikrozid[®] AF liquid

Zloženie

100 g prípravku mikrozid AF liquid obsahuje nasledujúce aktívne látky:

- 35 g Propan-1-ol
- 25 g Ethanol

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Bod vzplanutia	27 °C / Metóda: DIN 51755 Part 1
Dynamická viskozita	neurčené
Farba	bezfarebný
Forma	kvapalina
Hustota	cca. 0,89 g/cm ³ / 20 °C
pH	Nevztahuje se



Zvláštna upozornenia

Určené pre profesionálny trh. Termoelektrické prístroje používajte až po úplnom zaschnutí prípravku. Vysoko horľavá kvapalina a pary. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zápalnými zdrojmi. Zákaz fajčenia. Skladujte v uzatvorených obaloch, mimo zdrojov sálavého tepla, ohňa, nápojov, krmív, potravín a slnečného žiarenia. Teplota skladovania: -20 až +25 °C. Prípravok nie je vhodný na povrchy, ktoré narušuje alkohol (plexisklo, akryláty a lakované povrchy).

Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
Mikrozid AF liquid 250 ml, rozprašovač	10/Kartón	109160
Mikrozid AF liquid 1 l	10/Kartón	109304
mikrozid AF liquid 5 l	1/Kanister	109166

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke vyrába svoje produkty inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržania vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku

Zdravotnícky prostriedok triedy IIa



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com