

schülke -†



Tekutý alkalický čistiaci prípravok pre strojový reprocessing chirurgických nástrojov, flexibilných endoskopov a laboratórneho vybavenia

Silný umývací
účinnok

thermosept® alka clean forte

Naše Plus

- Výborná materiálová kompatibilita
- Široká škála použitia
- Použitie možné tiež na predmety z hliníka
- Dokonalé umývacie vlastnosti
- Minimalizuje možnosť prenosu príónov CJD (podľa odporúčania RKI)

Oblasti použitia

Na čistenie chirurgických, mikrochirurgických a MIS nástrojov, rigidných a flexibilných endoskopov, anestetickeho vybavenia, kontajnerov a pásových systémov. Výborne odstraňuje proteíny a minimalizuje riziko prenosu príónov CJD (podľa odporúčania RKI).

Návod na použitie

Dávkovanie:

Odporúčaná koncentrácia 0,5% (5 ml / l) v závislosti od stupňa znečistenia zvolíť v rozpätí 0,3-1% (3-10 ml / l). Po cykle čistenie pomocou **thermosept® alka clean forte** je doporučená neutralizácia pomocou prípravku **thermosept® NKZ**. Koncentrácia, doba čistenia a teplota sú závislé na miere znečistenia nástrojov. Dávkovanie sa vykonáva automaticky podľa nastavenia integrovaného dávkovacieho čerpadla v umývacom automate alebo dezinfektore. Vždy dodržujte inštrukcie výrobcov zariadení a zdravotníckych pomôcok. Na oplach, aj v priebehu reprocessingu, odporúčame použitie mäkkenej, alebo demineralizovanej vody.



thermosept® alka clean forte

Zloženie

<5% neionogénny povrchovo aktívne látky, <5% aniónové povrchovo aktívne látky, <5% NTA a jeho soli, <5% polykarboxyláty, enzýmy.

Ďalšie zložky: rozpúšťadlá, inhibítory korózie

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Bod vzplanutia	> 70 °C / Metóda : DIN 51755 Part 1
Dynamická viskozita	cca. 3 mPa.s / Metóda : ISO 3219
Farba	takmer bezfarebný
Forma	kvapalina
Hustota	cca. 1,08 g/cm ³ / 20 °C / 1.013 hPa
pH	12 - 12,8 / 100 % / 20 °C

Zvláštne upozornenia

Prípravok **thermosept® alka clean forte** nemiešajte s kyselinami. Uchovávajúte v originálnom, tesne uzatvorenom obale pri izbovej teplote. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným svetlom.

Doba expirácia: 36 mesiacov

Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
Thermosept alka clean forte 10 kg	1/Kanister	147302
Thermosept alka clean forte 5 kg	1/Kanister	147301

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke vyrába svoje produkty inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržania vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku

Zdravotnícky prípravok triedy I.



EMAS
GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG. NR. D-150-10023



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Phone +49 40 - 52100 - 0
Fax +49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com