

schülke -†



Koncentrovaný kvapalný dezinfekčný prípravok na bázi kombinovaného účinku aktívneho kyslíka a KAS, vhodný na dezinfekciu a umývanie plôch a povrchov v zdravotníctve, potravinárstve a komunálnej hygiene

Šetrný a účinný

desam® OX

Naše Plus

- Všestranný, účinný a ekonomický
- Bez nepríjemného zápachu - použitie v prítomnosti pacientov
- Šetrný k dezinfikovaným materiálom
- Ohľaduplný k životnému prostrediu
- Kompatibilný v systéme suchých utierok schülke wipes

Oblasti použitia

Desam OX je vhodný na každodennú dezinfekciu plôch a povrchov neinvazívnych zdravotníckych prostriedkov vo všetkých priestoroch zdravotníckych zariadení (operačné sály, JIP, neonatológia, rehabilitácie), komunálnej hygieny a potravinárstve. Vhodný na všetky neporézne, vodeodolné, umývateľné plochy a predmety. Je vhodný tiež na citlivé plasty (plexisklo). Prípravok je možné používať v prítomnosti pacientov.

Účinnosť

Baktericídny, levurocídny, virucídny (BVDV/Vaccinia/Rota/MVA), mykobaktericídny, tuberkulocídny, fungicídny. Pre bližšie informácie o mikrobicídnej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Návod na použitie

Desam OX sa používa na povrchy vopred zbavené viditeľného znečistenia. K získaniu požadovanej koncentrácie pracovného roztoku zmiešajte potrebné množstvo prípravku vo vlažnej vode. Na prípravu správnej koncentrácie použite aplikačné pomôcky (odmerky, pumpy, zmiešavač). Plochy a povrchy predmetov utrite pomocou textílie (mop, utierka a pod.) namočené v pracovnom roztoku. Malé vodeodolné predmety je možné ponoriť do pracovného roztoku, a po uplynutí doby expozície opláchnuť vodou a usušiť. Nemiešajte so žiadnymi inými čistiacimi či dezinfekčnými prípravkami. Nie je určený k dezinfekcii invazívnych zdravotníckych prostriedkov.

Dôkladne opláchnite dezinfikované plochy a predmety, ktoré majú prísť do styku s potravinami.

CE 1023



Zloženie

100 g prípravku **desam OX** obsahuje nasledujúce účinné látky:

- 11 g Peroxid vodíka
- 2 g Didecyldimethylammonium chlorid
- 2,8 g Alkyldimetylbenzylammonium chlorid

Ďalšie zloženie: povrchovoaktívne látky, parfém

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Bod vzplanutia	92 °C / Metóda : Vypočítaná hodnota
Dynamická viskozita	neurčené
Farba	bezfarebný
Forma	kvapalina
Hustota	1,046 g/cm ³ / 20 °C
pH	4 - 5 / 100 % / 20 °C

Zvláštne upozornenia

Určené len pre profesionálny trh. Nemiešajte s inými produktami. Pri práci používajte ochranné pomôcky. Nie je vhodný na povrchy s pozinkovaným povrchom, farebné kovy (meď, mosadz), polyamid, koža, guma, farebne nestabilné, porézne a poškodené materiály. Doba expirácie: 24 mesiacov.

Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
Desam ox 5 kg tr	2/Kartón	70000240
Desam ox 1 l	12/Kartón	70000070
Desam ox 5 kg	1/Kanister	319016

Životné prostredie

Spoločnosť Schulke vyrába svoje produkty inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržania vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku

Zdravotnícky prostriedok

Biocídny prípravok



Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie informácie o prípravku.



Spoločnosť Schulke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumin, Česká republika
Telefón +420 558 320 260
www.schulke.cz