

schülke -†



Tekutý bezalkoholový dezinfekčný prípravok určený k rýchlemu čisteniu a dezinfekcii povrchov zdravotníckych prostriedkov citlivých na alkohol.

Na citlivé
povrchy

desprej[®] sensitive

Naše Plus

- Šetrná dezinfekcia
- Vhodný na citlivé materiály
- Veľmi rýchly účinok
- Ihneď k použitiu
- Jemne parfumovaný príjemnou vôňou

CE 1023

Oblasti použitia

Desprej sensitive je vhodný pre oblasť zdravotníctva, ordinácie lekárov, ústavy sociálnej starostlivosti, domácu starostlivosť a všeobecnú prax. Vhodný na zdravotnícke prostriedky, prístroje a pomôcky z plastov a plexiskiel (inkubátory, displeje, UZV sondy, klávesnice, monitory atď.). Výborný na ošetrovanie zle dostupných miest a všade tam, kde je potrebné zaistiť rýchly dezinfekčný efekt. Vhodný aj do systému suchých vreckoviek schülke wipes.

Účinnosť

Baktericídny, levurocídny, virucídny (BVDV/Vaccinia/MVA), mykobaktericídny.

Pre bližšie informácie o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Návod na použitie

Vopred odstráňte hrubé nečistoty. Aplikujte prípravok postrekom tak, aby bol povrch rovnomerne a úplne namočený. Nechajte prípravok účinkovať po dobu požadovanej mikrobiologickej účinnosti. Následne prebytočnú vlhkosť utrite jednorazovou utierkou. Lesklé povrchy a povrchy obrazoviek utrite po dobe expozície dosucha čistou a suchou jednorazovou utierkou. Pri ošetrovaní zdravotníckych prostriedkov dbajte na pokyny výrobcu. Nie je určený k dezinfekcii invazívnych zdravotníckych prostriedkov.



desprej[®] sensitive

Zloženie

100 g prípravku **desprej sensitive** obsahuje nasledujúce aktívne látky:

- 0,02 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin
- 0,05 g Poly(hexametylenbiguanid) hydrochlorid
- 0,05 g Didecylidimethylamonium chlorid

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Bod vzplanutia	> 95 °C / Metóda : Vypočítaná hodnota
Dynamická viskozita	neurčené
Farba	bezfarebný
Forma	Kvapalina
Hustota	1,01 - 1,03 g/cm ³ / 20 °C
pH	7,5 - 8,5 / 100 % / 20 °C



Zvláštne upozornenia

Určené len pre profesionálny trh. Nevhodný na materiály zo silikónu, farebné kovy (meď, mosadz, hliník, zinok), gumené, mäkký PVC a polyamid.

Doba expirácie: 24 mesiacov.

Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
Desprej sensitive 500 ml	20/Kartón	70000072
Desprej sensitive 5 kg	1/Kanister	70000073

Životné prostredie

Spoločnosť Schulke vyrába svoje produkty inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržania vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku

Zdravotnícky prostriedok



Spoločnosť Schulke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumin, Česká republika
Telefón +420 558 320 260
www.schulke.cz