

Mycie i dezynfekcja wysokiego stopnia

Przygotowanie

Zdezynfekuj ręce i załóż odpowiednią odzież ochronną (SOI).



Zdezynfekuj
ręce



Załącz rękawice
ochronne

1. Mycie



Wyjmij
chusteczkę



Rozwiń
chusteczkę



Przetrzyj
dokładnie



Wyrzuć
chusteczkę

Otwórz opakowanie z chusteczkami myjącymi gigasept® powerSET3, wyjmij chusteczkę i ponownie zamknij opakowanie. Rozwiń chusteczkę.

Wyrób medyczny należy czyścić poprzez dokładne przecieranie go, wykonując obrotowe i zdecydowane ruchy. Wycierać oczyszczany sprzęt od części proksymalnej do dystalnej, aż do momentu, gdy nie będzie już widoczny brud, a na wszystkich powierzchniach pojawi się warstwa wilgoci. Zwróć szczególną uwagę na połączenia i krawędzie.

Wyrzuć chusteczkę.

W razie potrzeby zmień rękawiczki ochronne i zdezynfekuj ręce.

2. Dezynfekcja



Wyjmij
chusteczkę



Rozwiń
chusteczkę



Dokładnie
przecieraj



Wymagany czas
kontaktu: 5 minut



Wyrzuć
chusteczkę

Otwórz opakowanie z chusteczkami dezynfekcyjnymi gigasept® powerSET3, wyjmij chusteczkę i ponownie zamknij opakowanie. Rozwiń chusteczkę.

Przecieraj wyrób medyczny od części proksymalnej do dystalnej, zwracając szczególną uwagę na łączenia i krawędzie. Upewnij się, że wszystkie obszary są równomiernie i całkowicie zwilżone, tak aby na wszystkich powierzchniach znajdowała się warstwa wilgoci.

Odczekaj 5 minut.

Wyrzuć chusteczkę.

3. Mycie końcowe



Wyjmij
chusteczkę



Rozwiń
chusteczkę



Dokładnie
przecieraj



Wyrzuć
chusteczkę

Otwórz opakowanie z chusteczkami gigasept® powerSET3 do usuwania pozostałości po dezynfekcji w oznaczonym miejscu. Wyjmij i rozłóż chusteczkę.

Przecieraj dokładnie cały wyrób medyczny aż wszystkie powierzchnie zostaną całkowicie zwilżone i usunięte zostaną wszelkie pozostałości dezynfektantu.

Wyrzuć chusteczkę.

Dokumentacja



Zdejmij rękawice
ochronne



Zdezynfekuj
ręce



Uzupełnij książkę
dokumentacji

Zdejmij środki ochrony osobistej i zdezynfekuj ręce. Uzupełnij dokumentację (książka dokumentacji jest dołączona do produktu).

Sprawdź
film
instruktażowy:

