



Sporicidní ubrousky na bázi kyseliny peroctové určené k dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků

CE 0297

mikroqid® PAA+ wipes

Naše plus

- Sporicidní proti *C. difficile* do 5 minut
- Ihned k použití - není nutná aktivace
- Určeno pro dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků

Oblast použití

Přípravek je vhodný k závěrečné dezinfekci povrchů zdravotnických zařízení. Vzhledem k širokému spektru účinku (včetně sporicidní účinnosti) a krátké době kontaktu jsou ubrousky mikroqid® PAA+ ideálními dezinfekčními ubrousky pro použití v oblastech, kde je obzvláště vysoké riziko přenosu patogenních zárodků. Příkladem jsou izolační místnosti, operační sály, jednotky intenzivní péče, nečistá strana na odděleních endoskopie či neonatologii. Ubrousky jsou vhodné pro dezinfekci nekritických a semikritických zdravotnických prostředků kategorie A, pokud doporučení výrobce příslušného zdravotnického prostředku pro reprocessing umožňuje dezinfekci pomocí utěrek. Nejsou vhodné pro konečnou dezinfekci zdravotnických prostředků s lumenem a semikritických zdravotnických prostředků B nebo kritických zdravotnických prostředků. Reprocessing musí být validován dle lokálních standardů.

Účinnost

Baktericidní, levurocidní, fungicidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní, virucidní, sporicidní. Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití

Ubrouskem mikroqid PAA+ důkladně otřete povrchy. Zajistěte úplné navlhčení a nechte působit. Před dezinfekcí se ujistěte, že veškeré viditelné znečištění je odstraněno suchými jednorázovými ubrousky nebo ubrousky mikroqid® sensitive a že víko po použití opět pevně uzavřeno. Při otevírání dbejte na hygienické aspekty. Rozsah stíratelné plochy závisí na teplotě místnosti a struktuře dezinfikovaného povrchu. Ošetřujte pouze malé plochy. Dodržujte doporučení výrobce zdravotnického prostředku pro reprocessing. Po závěrečné dezinfekci semikritických zdravotnických prostředků A je nutné provést oplach vodou vhodné kvality. Zabraňte opětovné kontaminaci.

Certifikáty/Normy



Složení

100 g roztoku obsahuje následující účinné látky: 0,06 % kyseliny peroctové, další složky: peroxid vodíku, kyselina octová

Informace pro objednávku

Položka	Množství v balení	GTIN	Položka č.
mikroqid PAA+ wipes 50 ST DS	10 / karton	4032651987351	70004144



mikrozid® PAA+ wipes

Související produkty

- mikrozid® AF wipes
- mikrozid® sensitive wipes
- mikrozid® universal wipes green line
- mikrozid® universal wipes premium

Životní prostředí

Společnost schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Typ přípravku

Určeno pro profesionální trh. Je nezbytné používat ochranné rukavice (např. z nitrilové pryže). Nepoužívejte na hliník a neželezné kovy a nemíchejte s jinými čisticími prostředky. Společnost schülke zaručuje po otevření obalu a dodržení návodu trvanlivost 28 dní. Závažné události v souvislosti s výrobkem musí být hlášeny výrobci a příslušnému orgánu.



schülke +

Distributor
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445 445
Nový Bohumín
735 81 Bohumín | Czech
Republic
Telefon +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Výrobce
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt | Germany
Telefon +49 40 52100582
www.schuelke.com
info@schuelke.com



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky