



Saurer Enthärter für die thermische Aufbereitung von Steckbecken und Urinflaschen



thermosept® SKS

Unser Plus

- verhindert den Aufbau von Kalkbelägen
- unterstützt eine rückstandsfreie Abtrocknung des Spülgutes
- schaumfrei, enthält keine Tenside
- besonders umweltschonend
- hohe Materialverträglichkeit bei Edelstahl und diversen Kunststoffen

Anwendungsgebiet

thermosept® SKS ist geeignet für die Verwendung zur thermischen Aufbereitung von Steckbecken und Urinflaschen. thermosept® SKS verfügt über spezielle Enthärterkomponenten zur Abbindung der Wasserhärte und sorgt für eine fleckenfreie Abtrocknung des Spülgutes. Das Produkt ist schaumfrei und bei allen Wasserhärten verwendbar.

Anwendungshinweise

Dosierung:

0,01 % pro 1° dH, das entspricht einer Dosierung von 0,1 - 0,3 %, (1 - 3 ml/l Wasser).

Die Dosierung erfolgt über maschineneigene Dosierpumpen, diese sind auf Säurebeständigkeit zu prüfen. Sollte eine starke Verkalkung des Heizstabes festgestellt worden sein, empfiehlt es sich, vor Einsatz von thermosept® SKS eine Entkalkung vorzunehmen (z.B. mit thermosept® NKZ oder thermosept® NKP). thermosept® SKS verhindert auch bei hoher Wasserhärte Kalkablagerungen im Verdampfer.

Ausschließlich für die Verwendung durch Fachkräfte bestimmt.

Produktdaten

Zusammensetzung:
Härtstabilisator, Korrosionsinhibitoren, organische Säuren.

Bestellinformation

Artikel		Lieferform	GTIN	Art.-Nr.
thermosept SKS	5 kg KA	1 / Kanister	4032651458066	145806
thermosept SKS SOKA	5 kg KA	1 / Kanister	4032651458035	145803

Anwendungshilfen

Artikel	Art.-Nr.
Kanisterhahn für 5 l / 10 l	135502
Kanisterschlüssel für 5 + 10 l	135810
Umfülltrichter	117901
schülke Kanisterdosierer 5 l / 10 l (20 ml / Hub)	117101

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Informationen

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.

Für individuelle Fragen:

Application Department

Telefon: +49 40 52100-666



