



Przeznaczony do stosowania wyłącznie w celu sprawdzania szczelności rękawic.

schülke optics lotion

Zalety

- płyn fluorescencyjny do sprawdzania szczelności rękawic
- do kontroli przepuszczalność rękawic w świetle UV

Obszary zastosowania

Produkt przeznaczony do stosowania wyłącznie w celach szkoleniowych - do sprawdzania szczelności rękawic. Nie należy stosować produktu jako balsamu pielęgnacyjnego.

Właściwości produktu

Płyn fluorescencyjny przeznaczony do sprawdzania szczelności rękawic ochronnych.

Wskazówki dotyczące stosowania

Założ rękawiczki. Nanieś na powierzchnię rękawic płyn schülke optics lotion - tak jak nanosi się na ręce płyn do dezynfekcji. Zdejmij rękawiczki. Umieść dłonie pod lampą UV (366 nm). Jeżeli rękawice są nieszczelne, schülke optics lotion przedostaje się przez nieszczelności w rękawicach. Okolice dłoni, na które przedostał się preparat schülke optics lotion świecą, wskazując na przepuszczalność rękawic.



schülke optics lotion

Dane produktu

Aqua, Paraffinum Liquidum, Cetearyl Ethylhexanoate, Glycerin, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Polyglyceryl-3 Methylglucose Distearate, Stearic Acid, Glyceryl Stearate, Isopropyl Myristate, Cera Alba, Allantoin, Sodium Polyacrylate, Xanthan Gum, Stilbene Derivative, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, Citric Acid

Dane chemiczno-fizyczne

Forma	emulsja
Gęstość	ok. 0,98 g/cm ³ / 20 °C
Kolor	biały
pH	ok. 5,0 / 20 °C
Tarcie, dynamiczne	ok. 1.000 mPa*s / 20 °C / Metoda : DIN 53019
Temperatura zapłonu	Nie dotyczy

Informacje dotyczące zamówienia

Artykuł	Forma dostawy	Art.-Nr.
schülke optics lotion 500 ml FL	20/Karton	70000944

Informacje dotyczące ochrony środowiska

schülke wytwarza produkty w sposób ekonomiczny, stosując zaawansowane, bezpieczne i przyjazne dla środowiska procesy produkcyjne, zachowując jednocześnie wysokie standardy jakości.



EMAS
GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG. NR. 0-100-10003



Schulke & Mayr GmbH posiada pozwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z §13 ustawy o produktach leczniczych oraz posiada certyfikat GMP.

Dystrybutor
Schulke Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 132
02-305 Warszawa, Polska
Telefon +48 22 11 60 700
Telefax +48 22 11 60 701
www.schulke.pl
schulke.polska@schuelke.com

Podmiot odpowiedzialny
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Niemcy
Telefon +49 40 - 52100 - 0
+49 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
info@schuelke.com