



Tekutý přípravek určený k dezinfekci a čištění invazivních nástrojů a povrchů zdravotnických prostředků

Čistí a dezinfikuje
v jednom kroku

discleen® extra

Naše Plus

- Rychlý a spolehlivý účinek
- Výborná materiálová kompatibilita
- Použití i v přítomnosti pacientů
- Snadné dávkování pomocí dávkovací lahve

CE 1023

Oblast použití

Vhodný pro manuální dezinfekci a čištění nástrojů, pomůcek a povrchů zdravotnických prostředků. Vhodný pro použití i v přítomnosti pacientů (např. porodnická a novorozenecká oddělení, ARO, JIP, rehabilitace a léčebny). Přípravek je kompatibilní s mnoha druhy materiálů, jako je nerezová ocel, barevné kovy a jejich slitiny, pochromované a smaltované povrchy, sklo, porcelán a plastické hmoty

Účinnost

Baktericidní, virucidní na BVDV/ Vaccinia / MVA, mykobaktericidní, fungicidní

Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití

Pro dezinfekci a čištění nástrojů se ředí vodou o teplotě 20-25 °C na požadovanou koncentraci. Nástroje určené k reprocessingu se ponoří do připraveného roztoku tak, aby byly zcela ponořené a roztokem byly naplněné všechny duté části po stanovenou dobu expozice. Po expozici a následném čištění se nástroje vyjmou z roztoku a důkladně se opláchnou pitnou vodou. Plochy zdravotnických prostředků a pomůcek lze dezinfikovat a čistit také pomocí otěru. Silně znečištěné plochy se nejprve mechanicky očistí a potom dezinfikují. Přípravek není vhodný pro závěrečnou dezinfekci kritických a semikritických zdravotnických prostředků.



Složení

100 g přípravku **discleen® extra** obsahuje následující aktivní látky:

- 3,5 g Alkylbenzyltrimethylammonium chloride
- 5,0 g Didecyltrimethylammonium chloride
- 6,6 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropane-1,3-diamine

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Barva	žlutý
Forma	kapalný
pH	9 - 10 / 100 % / 20 °C
Zápalná teplota	62 °C / Metoda: Vypočtená hodnota

Zvláštní upozornění

Určeno pro profesionální trh. Nedoporučuje se míchat s jinými přípravky či detergenty. Není kompatibilní s přípravky na bázi aldehydů. Nepoužívejte na silikon a latex, polykarbonát, měkčené PVC a přírodní i syntetické gumy.

Doba expirace: 24 měsíců

Objednávkové informace

Název produktu	Balení	Číslo výrobku
Discleen extra 1 l	12/Karton	70000087
Discleen extra 5 kg	1/Kanistr	70000088

Související přípravky

- gigasept® AF forte
- gigasept® instru AF

Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality. Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.

Typ přípravku

Zdravotnický prostředek



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Výrobce
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com