

# schülke -+



Pěna na dezinfekci a čištění chirurgických nástrojů

**Hustá  
dezinfekční  
pěna**

## gigazyme® actifoam +

### Naše Plus

- Dezinfikuje a čistí v jednom kroku
- Ochrana nástroje i personálu
- Moderní a uživatelsky jednoduchý přístup v péči o chirurgické nástroje
- Hustá pěna s vysokou stabilitou
- Zabraňuje zasychání biologického materiálu na povrchu chirurgického nástroje
- Díky komplexu tří enzymů rychle rozkládá organické zbytky

CE 1023

### Oblast použití

**gigazyme® actifoam+** je dezinfekční přípravek ve formě pěny, s výbornou čistící schopností. Vysoce aktivní pěna rovněž zamezuje zaschnutí biologické zátěže na povrchu operačního instrumentária a nástrojů v průběhu transportu a nezbytné doby čekání na předsterilizační přípravu operačního instrumentária.

### Účinnost

Baktericidní, levurocidní, omezeně virucidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní

Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

### Návod na použití

Použité operační instrumentárium vložte do dekontaminační nádoby (kontejnery, dezinf. nádoby) a naneste na povrch nástrojů souvislou vrstvu pěny, poté nádobu uzavřete. Před předsterilizační přípravou z nástrojů důkladně opláchněte zbytky pěny a organické zátěže a pokračujte v reprocessingu. Přípravek se neředí, je určen k přímému použití. Není určen na čištění endoskopů, nástrojů vyrobených z hliníku, eloxovaného hliníku, polykarbonátu a pozinkovaných povrchů.



# gigazyme<sup>®</sup> actifoam +

## Složení

100 gigazyme<sup>®</sup> actifoam obsahuje:

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropione-1,3-diamin 0,27 g, 2-phenoxyethanol 0,2 g, didecyl-dimethylammoniumcarbonate 0,55 g

Další látky: tensidy, enzymatický komplex, antikorozivní látky

## Zvláštní upozornění

Skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech, v suchých prostorách při teplotách od +5 do + 25°C. Zbytková množství přípravku aplikovat v souladu s návodem k použití nebo odevzdat k likvidaci oprávněným firmám. Prázdné obaly po důkladném vypláchnutí předejte k recyklaci.

Doba expirace: 24 měsíců

## Objednávkové informace

| Název produktu                | Balení    | Číslo výrobku |
|-------------------------------|-----------|---------------|
| gigazyme actifoam + 750 ml FL | 12/Karton | 70002877      |

## Životní prostředí

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality. Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitelem certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.

## Typ přípravku

Zdravotnický prostředek



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky.

Výrobce  
Schulke CZ, s.r.o.  
Lidická 445  
735 81 Bohumín  
Česká republika  
tel.: +420 558 320 260  
www.schulke.cz  
schulkecz@schuelke.com