



Koncentrát na bázi aktivního kyslíku v práškové formě pro dezinfekci a čištění ploch a povrchů zdravotnických prostředků

perform® pro

Naše plus

- výborná materiálová kompatibilita
- sporicidní účinnost
- bez barviv a parfémů

Oblast použití

Produkt perform® pro se používá k dezinfekci a čištění ploch a povrchů zdravotnických prostředků. Je vhodný na veškeré omyvatelné plochy a povrchy. Díky úpravě a vylepšení receptury velmi dobře zavedeného produktu se širokým spektrem účinku a vysokou materiálovou kompatibilitou lze perform® pro použít ve všech nemocničních prostorách.

Účinnost

baktericidní, levurocidní, virucidní, tuberkulocidní, mykobaktericidní, fungicidní, sporicidní. Pro získání více informací o mikrobiologické účinnosti a expoziční době kontaktujte zástupce společnosti Schülke.

Návod na použití

Pro přípravu pracovního roztoku naplňte kbelík vodou (max. 30 °C), přidejte přípravek a rozpustěte:

- 1 sáček (40 g) na 8 l vody = 0,5% roztok
- 2 sáčky (80 g) na 8 l vody = 1% roztok

Připravené pracovní roztoky mají životnost 24 hodin (při 25 °C) a zaručují stabilitu účinné látky. V případě silné kontaminace by měl být pracovní roztok vyměněn dříve. Dezinfekce povrchů: Naneste pracovní roztok v požadované koncentraci na podlahu stíráním ve dvou krocích. Zdravotnické prostředky a jiné povrchy otřete navlhčenou utěrkou. Abyste zabránili tvorbě residuů, měla

by na povrchu po druhém stírání zůstat pouze minimální zbytková vlhkost. Před dezinfekcí se ujistěte, že jsou odstraněny všechny viditelné nečistoty.

Složení

100 g obsahuje 45 g pentapotassium bis(peroxymonosulfate) bis(sulfate). Další složení: sodium (1-hydroxyethyliden)bisfosfonát sodný, dodecylsulfát sodný, kyselina vinná.

Zvláštní upozornění

Dezinfekční prostředky používejte bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.

V případě silného znečištění předem vyměňte pracovní roztok. Provozní roztok může mít bělicí účinek na některá velmi citlivá textilní barviva. Recyklujte pouze zcela vyprázdňené obaly. Zbytky produktu lze zlikvidovat s domovním odpadem. Zajistěte dostatečné větrání v místě použití.

Pouze pro profesionální použití. Jakékoli závažné incidenty související s produktem je nutné nahlásit výrobci a příslušnému orgánu.

Informace pro objednávku

Položka	Množství v balení	GTIN	Položka č.
perform pro (250x) 40 g BT	250 / karton/kartony	4032651985180	70003655
perform pro -PL,CZ,SK- 900 g DS	4 / karton/kartony	4032651985272	70003659

Životní prostředí

Společnost schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Společnost Schülke vyrábí produkty ekonomicky a s využitím pokročilých, bezpečných a ekologických výrobních procesů a zároveň si zachovává vysoké standardy kvality.

Typ přípravku

Biocid, Zdravotnický prostředek



schülke -+

Distributor

Schulke CZ, s.r.o.

Lidická 445

735 81 Bohumín | Czech

Republic

Telefon +420 558 320 260

www.schulke.cz

schulkecz@schulke.com

Výrobce

Schülke & Mayr GmbH

Robert-Koch-Straße 2

22851 Norderstedt | Germany

Telefon +49 40 52100582

www.schuelke.com

info@schuelke.com



Společnost Schülke & Mayr GmbH je držitelem oprávnění výrobce podle § 13 odst. 1 německého zákona o léčivých přípravcích a certifikátů o dodržování GMP pro léčivé přípravky