

# schülke →



Saurer Enthärter für die thermische Aufbereitung von Steckbecken und Urinflaschen.

## thermosept® SKS

### Unser Plus

- verhindert den Aufbau von Kalkbelägen
- unterstützt eine rückstandsfreie Abtrocknung des Spülgutes
- schaumfreie Formulierung
- gute Materialverträglichkeit bei Edelstahl, Aluminium und Kunststoff

### Anwendungsgebiete

*thermosept® SKS* ist geeignet für die Verwendung zur thermischen Aufbereitung von Steckbecken und Urinflaschen. *thermosept® SKS* verfügt über spezielle Enthärterkomponenten zur Abbindung der Wasserhärte und sorgt für eine fleckenfreie Abtrocknung des Spülgutes. Das Produkt ist bei allen Wasserhärten verwendbar.

### Anwendungshinweise

#### Dosierung:

0,01 % pro 1° dH, das entspricht einer Dosierung von 0,1 - 0,3 % (1 - 3 g/l Wasser).

Die Dosierung erfolgt über maschineneigene Dosierpumpen, diese sind auf Säurebeständigkeit zu prüfen.

Sollte eine starke Verkalkung des Heizstabes festgestellt worden sein, empfiehlt es sich, vor Einsatz von *thermosept® SKS* eine Entkalkung vorzunehmen (z.B. mit *thermosept® NKZ* oder *thermosept® NKP*).

*thermosept® SKS* verhindert auch bei harter hoher Wasserhärte Kalkablagerungen im Verdampfer.



## Produktdaten

Zusammensetzung:  
organische Säuren, Härtestabilisator, Korrosionsinhibitoren

### Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,08 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	> 100 °C
Form	flüssig
pH	ca. 1,3 / 20 °C
Viskosität, dynamisch	Keine Daten verfügbar

## Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
thermosept SKS SOKA 5 kg KA	1/Kanister	145803
thermosept SKS 5 kg KA	1/Kanister	145806

## Anwendungshilfen

Anwendungshilfen	Art.-Nr.
Kanisterschlüssel für 5/10 l Kanister	135810

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com). Für individuelle Fragen:

Customer Sales Service

Telefon: +49 40 52100-666

E-Mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.

**schülke Österreich**  
Schülke & Mayr GmbH  
Seidengasse 9  
1070 Wien, Österreich  
Tel. +43 (1) 523 25 01  
Fax +43 (1) 523 25 01 - 60  
[www.schuelke.at](http://www.schuelke.at)  
[office.austria@schuelke.com](mailto:office.austria@schuelke.com)

**schülke Hauptsitz**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)