

schülke →



Pulverförmiges Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von Flächen und Medizinprodukten auf Basis von Aktiv-Sauerstoff

CE 0297

perform® pro

Unser Plus

- sehr gute Materialverträglichkeit
- breites Wirkspektrum (viruzid, tuberkulozid, sporizid)
- auf Basis von Aktiv-Sauerstoff

Anwendungsgebiet

perform® pro ist für die Desinfektion von Flächen und Medizinprodukten geeignet. Durch die Weiterentwicklung eines sehr gut etablierten Produkts mit breitem Wirkspektrum und hoher Materialverträglichkeit findet perform® pro Anwendung in allen Krankenhausbereichen. Darüber hinaus wurde das Produkt so weiterentwickelt, dass es auch den aktuellen Anforderungen der Biozidverordnung entspricht.

Anwendungshinweise

Zum Ansetzen der Gebrauchslösung Eimer mit Wasser (max. 30° C) füllen, Produkt hinzugeben und lösen:

- 1 Beutel (40 g) auf 8 l Wasser = 0,5%ige Lösung
- 2 Beutel (80 g) auf 8 l Wasser = 1%ige Lösung

Beim Einsatz der Dose erfolgt eine entsprechende Dosierung gemäß dem Dosen-Etikett. Angesetzte Gebrauchslösungen verfügen über eine Standzeit von 24 Stunden ($\leq 25^\circ \text{C}$) und 4 Stunden ($\leq 40^\circ \text{C}$) über eine gewährleistete Wirkstoffstabilität. Gebrauchslösung bei deutlich sichtbarer Verschmutzung erneuern.

Stellen Sie sicher, dass vor der Desinfektion alle sichtbaren Verschmutzungen entfernt werden. Ausrüstung gut mit Wasser reinigen.

Flächendesinfektion: Die Gebrauchslösung in gewünschter Konzentration im 2-Stufen Wisch-Verfahren auf Fußböden ausbringen. Flächen feucht wischen. Zur Vermeidung von

Rückstandsbildungen sollte nach dem 2. Wischvorgang nur eine minimale Restfeuchte auf der Fläche verbleiben.

Mikrobiologische Wirksamkeit

Empfohlene Gebrauchskonzentration*

	Testmethode	1 %	3 %	0,5 %	2 %
Bakterielle Sporen					
sporizid (C. difficile)	EN 17126; EN 17846	60 Min.	30 Min.		
sporizid	EN 17126		60 Min.		
Bakterien, Hefen und Mykobakterien					
bakterizid	gemäß VAH EN 17387	60 Min. 5 Min.**	5 Min.**	60 Min.	
levurozid	gemäß VAH	60 Min. 5 Min.**	5 Min.**	60 Min.	
mykobakterizid	EN 14348				60 Min.**
Pilze und Sporen					
fungizid	EN 17387				60 Min.
Viren					
begrenzt viruzid PLUS	EN 14476; EN 16777	5 Min.**		5 Min.	
viruzid	EN 14476; EN 16777	60 Min. 5 Min.**	5 Min.**	60 Min.	

*inkl. Phase 2/ Stufe 1 und Phase 2/ Stufe 2 Testung

**geringe Belastung

0,5 % = 5 g/l; 1 % = 10 g/l; 2 % = 20 g/l; 3 % = 30 g/l

Angaben aller Konzentrationen unter hoher Belastung



Zertifikate / Normen



Produktdaten

Zusammensetzung: 100 g enthalten: 49,5 g Pentakaliumbis(peroxymonosulfat)bis(sulfat). Enthält: Dinatriumdihydrogen(1-hydroxyethyliden)bisphosphonat, Natriumdodecylsulfat, (+)-Weinsäure.

Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Das Tragen von Handschuhen ist erforderlich. Bei starker Verschmutzung Gebrauchslösung vorzeitig wechseln. Die Gebrauchslösung kann auf sehr empfindliche Textilfarbstoffe bleichend wirken. Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden. Für ausreichende Belüftung am Ort des Gebrauchs sorgen. perform[®] pro ist zudem für die Desinfektion von Atemschutz- und Inhalationsmasken sowie Übungspuppen geeignet. Reinigen Sie die Ausrüstung und das Medizinprodukt gründlich mit Wasser. Oder tauchen Sie zerlegte Teile von Medizinprodukten in die Gebrauchslösung ein. Nach der erforderlichen Einwirkzeit mit Wasser abspülen. Schwerwiegende Vorfälle im Zusammenhang mit dem Produkt sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde zu melden.

Ausschließlich für die Verwendung von Fachkräften bestimmt!

Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
perform pro 900 g DS	4 / Karton(e)	70003657
perform pro (250x) 40 g BT	250 / Karton(e)	70003655
perform pro (60x) 40 g BT	60 / Karton(e)	70003654

Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Gutachten und Informationen

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter www.schuelke.com.

Für individuelle Fragen: Application
Department Telefon: +49 40 52100-666 E-Mail:
info@schuelke.com



schülke -+

schülke Österreich
Schülke & Mayr GmbH
Seidengasse 9
1070 Wien | Österreich
Tel. 43-1-5232501-0
www.schuelke.at
office.austria@schuelke.com

schülke Hauptsitz
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt | Deutschland
Tel. +49 40 52100582
www.schuelke.com
info@schuelke.com



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.