



Saurer Klarspüler und Enthärter für die thermische Aufbereitung von Steckbecken und Urinflaschen

## thermosept® SEK fresh

### Unser Plus

- der milde Frischduft reduziert die Geruchsentwicklung und erhöht die Anwenderfreundlichkeit
- beseitigt vorhandene Kalkbeläge und verhindert dessen Aufbau
- fördert eine rückstandsfreie Trocknung und verkürzt die Trocknungszeit
- schaumarme Formulierung und gute Materialverträglichkeit

### Anwendungsgebiete

thermosept® SEK fresh ist ein leicht saurer Klarspüler und Enthärter mit dezentem Frischduft und mildert unangenehme Geruchsbildungen. thermosept® SEK fresh eignet sich für die Verwendung zur thermischen Aufbereitung von Steckbecken und Urinflaschen in marktüblichen Geräten. Die spezielle Kombination von Tensiden und Säuren schützt Spülgut und Geräte vor Ablagerungen und unterstützt eine schnelle und rückstandsfreie Trocknung.

### Anwendungshinweise

#### Dosierung:

0,01 % pro 1° dH, das entspricht einer Dosierung von 0,1 - 0,3 %, (1 - 3 ml/l Wasser).

Die Dosierung erfolgt über maschineneneigene Dosierpumpen, diese sind auf Säurebeständigkeit zu prüfen. Überdosierungen vermeiden, da diese zu unerwünschter Schaumbildung führen können. Sollte bereits eine starke Verkalkung des Heizstabes festgestellt worden sein, wird empfohlen, vor dem Einsatz von thermosept® SEK fresh eine Entkalkung vorzunehmen (z.B. mit thermosept® NKZ). thermosept® SEK fresh verhindert auch bei hartem Wasser Kalkablagerungen im Verdampfer und am Heizstab. Um Verkalkungen generell vorzubeugen, sollte in regelmäßigen Abständen Wartungen der Steckbecken-Automaten erfolgen.



## Produktdaten

### Zusammensetzung:

thermosept® SEK fresh enthält organische Säuren, nichtionische Tenside, Komplexbildner.

### Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 1,06 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
Farbe	farblos fast farblos
Flammpunkt	66 °C / Methode: DIN 51755 Part 1
Form	flüssig
pH	ca. 1 - 2 / 20 °C / Konzentrat

## Besondere Hinweise

Behälter dicht geschlossen halten. Im Originalbehälter bei Raumtemperatur lagern.

## Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
thermosept SEK fresh SOKA 5 I KA	1/Kanister	70001065
thermosept SEK fresh 10 I KA	1/Kanister	70001066

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Präparat thermosept® SEK fresh finden Sie im Internet unter [www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)

Für Ihre individuellen Fragen richten Sie sich an unser Exklusivpartner:

### Sanaclean AG

Altishoferstrasse 5  
6252 Dagmersellen  
Tel.: 062 748 49 39  
Fax: 062 748 49 38  
[contact@sanaclean.ch](mailto:contact@sanaclean.ch)  
[www.sanaclean.ch](http://www.sanaclean.ch)

# Sanaclean AG



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.



Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.

schülke Schweiz  
Schülke & Mayr AG  
Sihlfeldstr. 58  
8003 Zürich, Schweiz  
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44  
Fax +41 (0) 44 - 44655 - 33  
[www.schuelke.ch](http://www.schuelke.ch)  
[mail.ch@schuelke.com](mailto:mail.ch@schuelke.com)

schülke Hauptsitz  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)