

schülke -+



Reiniging, desinfectie en onderhoud voor alle tandheelkundige systeemunits en amalgaamsfscheiders. Dagelijks 1-2 keer gebruiken

CE 0279

aspirmatic®

Onze pluspunten

- geschikt voor alle amalgaamsfscheiders (bijv. Dür, Metasys)
- kan gebruikt worden in alle behandelingsunits (bijv. Sirona, KaVo, Castellini, etc.)
- bewezen reinigingskracht, getest in uitvoerige praktijksonderzoeken, o.a. bij KaVo en Sirona
- economisch in gebruik
- eenvoudige toepassing
- schuimt niet

Toepassingsgebied

Voor de dagelijkse reinigende desinfectie en verzorging van dentale afzuigsystemen en kwispedoren [CE 0297].

Gebruiksaanwijzing

Gebruik aspirmatic® 's middags en aan het einde van de dag in een oplossing van 2% voor een reinigende desinfectie. Gebruik 2 l aspirmatic® gebruiksooplossing per tandheelkundige unit en gebruik dit in combinatie met de schülke maatbeker. Voeg voor 2 l gebruiksooplossing 40 ml aspirmatic® toe aan 1960 ml koud water. Zuig 1 1/2 liter gebruiksooplossing door de zuigslangen en giet de resterende 1/2 liter in de spoelbak. Laat minimaal 60 minuten of een nacht inwerken. We raden aan om aspirmatic® cleaner 1-2 per week te gebruiken in plaats van aspirmatic®.

Productgegevens

Samenstelling: 100 g bevat de volgende actieve ingrediënten: 7,5 g dioctyl dimethyl ammonium chloride. Etikettering overeenkomstig verordening (EG) No 648/2004: < 5 % niet ionisch oppervlakteactieve stoffen, < 5 % zeep.

Speciaal advies

Draag bij het hanteren van desinfecterende middelen die schadelijk zijn voor de huid goed beschermende rubberen handschoenen.

Bestelinformatie

Artikel		Leveringsformulier	GTIN	Artikelnr.
aspirmatic FL	2 l	5 / karton(s)	4032651984121	70003399

Applicatoren

Artikel	Artikelnr.
Doseerdop 2 lt fles	183401
schülke dental application aid	70002773

Gerelateerde producten

- aspirmatic® cleaner
- aspirmatic® system
- schülke dental application aid®

Milieu-informatie

schülke vervaardigt haar producten middels geavanceerde, veilige en milieuvriendelijke productieprocessen, met inachtneming van hoge kwaliteitseisen. schülke vervaardigt haar producten middels geavanceerde, veilige en milieuvriendelijke productieprocessen, met inachtneming van hoge kwaliteitseisen.

Expert opinie informatie

Voor meer informatie en een overzichtsbrochure kunt u contact opnemen met Schulke Benelux 0031 (0) 23 535 26 34 of via de website www.schuelke.com



schülke -+

schülke Benelux
Schülke & Mayr Benelux B.V.
Oudeweg 8d
2031 CC Haarlem | Netherlands
Telefoon +31 23 535 26 34
www.schuelke.nl
salesbenelux@schuelke.com

schülke hoofdkantoor
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt | Germany
Telefoon +49 40 52100582
www.schuelke.com
info@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH beschikt over een fabrikantenvergunning overeenkomstig artikel 13, par. 1 van de Duitse Geneesmiddelenwet en over certificaten betreffende GMP-naleving voor geneesmiddelen.