

schülke →



Voor wekelijkse speciaalreiniging van dentale afzuigsystemen, kwispedours en afzuigslangen



aspirmatic® cleaner

Onze pluspunten

- aldehydevrij
- eenvoudige en veilige toepassing
- bewezen reinigingskracht, getest in uitvoerige praktijksonderzoeken, o.a. bij KaVo en Sirona
- geen storende schuimvorming
- economisch in gebruik

Toepassingsgebied

Voor de ondersteunende wekelijkse speciale reiniging van tandheelkundige zuigsysteem, de kwispedoor en de afvoerleidingen.

Gebruiksaanwijzing

Aspirmatic® cleaner (ter voorkoming en verwijdering van kalkaanslag) dient een- tot tweemaal per week te worden toegepast in aansluiting op de reinigende desinfectie in een 5%-ige oplossing. Maak per behandelingseenheid 2L gebruiksklare oplossing klaar met behulp van het Aspirmatic® systeem. Voeg hiervoor 100 ml aspirmatic® cleaner toe aan 1900 ml lauw water (5x kiepen via de doseerdop). Teneinde schuimvorming te voorkomen, dient u eerst de juiste hoeveelheid water af te meten, waaraan u de aangegeven hoeveelheid aspirmatic® cleaner toevoegt. Zuig 1,5 L gebruiksooplossing door de aanzuigslangen en giet de resterende 0,5 L in de spoelbak. Laat circa 1 tot 2 uur inwerken - niet overnacht laten staan of tijdens het weekend. Spoel aansluitend altijd door met minimaal 1 L schoon water alvorens u het afzuigstelsel weer in gebruik neemt. In geval van ernstige vervuilingen kan 10% gedoseerd worden (200 ml aspirmatic® cleaner bij 1.800 ml water). Het aspirmatic® systeem zorgt voor eenvoudige en zekere toepassing en bereiding van de

oplossing. De zuigslangen zijn eenvoudig op het systeem aan te sluiten.

Productgegevens

Samenstelling: Etiketering volgens de regelgeving (EC) No.648/2004: 5 % niet-ionische oppervlakte actieve stoffen.

Speciaal advies

Draag bij het hanteren van desinfecterende middelen die schadelijk zijn voor de huid goed beschermende rubberen handschoenen.

Bestelinformatie

Artikel	Leveringsformulier	GTIN	Artikelnr.
aspirmatic cleaner 2 l FL	5 / karton(s)	4032651503025	150302

Applicatoren

Artikel	Artikelnr.
Doseerdop 2 lt fles	183401
schülke dental application aid	70002773

Gerelateerde producten

- aspirmatic®
- schülke dental application aid®



aspirmatic® cleaner

Milieu-informatie

schülke vervaardigt haar producten middels geavanceerde, veilige en milieuvriendelijke productieprocessen, met inachtneming van hoge kwaliteitseisen.

Expert opinie informatie

Voor meer informatie en een overzichtsbrochure kunt u contact opnemen met Schulke Benelux 0031 (0) 23 535 26 34 of via de website www.schuelke.com



schülke -+

schülke Benelux
Schülke & Mayr Benelux B.V.
Oudeweg 8d
2031 CC Haarlem | Netherlands
Telefoon +31 23 535 26 34
www.schuelke.nl
salesbenelux@schuelke.com

schülke hoofdkantoor
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt | Germany
Telefoon +49 40 52100582
www.schuelke.com
info@schuelke.com



Schülke & Mayr GmbH beschikt over een fabrikantenvergunning overeenkomstig artikel 13, par. 1 van de Duitse Geneesmiddelenwet en over certificaten betreffende GMP-naleving voor geneesmiddelen.