

schülke -+



Tekutý dezinfekčný prípravok na báze kombinovaného účinku alkoholov vhodný k rýchlej dezinfekcii malých plôch a povrchov zdravotníckych prostriedkov.

CE 0297

Rýchly účinok

mikrozid® AF liquid

Naše plus

- Okamžité k použitiu
- Zaručuje rýchly dezinfekčný efekt
- Vhodný k dezinfekcii zle dostupných miest
- Dobrá materiálová znášanlivosť
- Nezanecháva šmuhy

Oblasť použitia

mikrozid® AF liquid sa odporúča k rýchlej dezinfekcii malých plôch a povrchov zdravotníckych prostriedkov (stoly, vozíky, kľučky, dvere, pomôcky atď.). Vhodný na lesklé povrchy a oblasti so zvýšeným infekčným rizikom. Prípravok je vhodný tam, kde je potrebná rýchla a účinná dezinfekcia zdravotníckych pomôcok ako napr.:

- Povrchy v blízkosti pacientov
- Kontaktné plochy
- Ordinácie
- Operačné stoly a okolité povrchy
- Zdravotnícke prostriedky

Účinnosť

Baktericídny, virucídny, mykobaktericídny, fungicídny.

Pre bližšie informácie o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Návod na použitie

mikrozid® AF liquid sa neriedi a aplikuje sa koncentrovaný pomocou nástreku prípadne náteru. Povrch dôkladne namočte roztokom a nechajte pôsobiť po dobu 1 minúty prípadne

prebytočné množstvo tekutiny utrite po uplynutí doby expozície jednorazovou utierkou.

Zloženie

100 g prípravku mikrozid AF liquid obsahuje nasledujúce aktívne látky:

- 35 g Propan-1-ol
- 25 g Ethanol

Špeciálne odporúčania

Určené pre profesionálny trh. Termoelektrické prístroje používajte až po úplnom zaschnutí prípravku. Vysoko horľavá kvapalina a pary. Chráňte pred teplom, horúcimi povrchmi, iskrami, otvoreným ohňom a inými zápalnými zdrojmi. Zákaz fajčenia. Skladujte v uzatvorených obaloch, mimo zdrojov sálavého tepla, ohňa, nápojov, krmív, potravín a slnečného žiarenia. Teplota skladovania: -20 až +25 °C. Prípravok nie je vhodný na povrchy, ktoré narušuje alkohol (plexisklo, akryláty a lakované povrchy).

mikrozid® AF liquid

Informácie pre objednávku

Položka	Množstvo v balení	GTIN	Položka č.
Mikrozid AF liquid 250 ml, rozprašovač	10 / Kartón	4032651091607	109160
mikrozid AF liquid 750 ml FL	12 / Kartón	4032651986408	70004022
mikrozid AF liquid -PL- 10 l KA	1 / Kanister	4032651091546	109154
mikrozid AF liquid 5 l	1 / Kanister	4032651091669	109166
mikrozid AF liquid EU-A 1 l FL	10 / Kartón	4032651093021	109302

Životné prostredie

Spoločnosť schülke svoje produkty vyrába inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržanie vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku

Zdravotnícky prostriedok triedy IIa, biocid



Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

schülke

Distribútor
Schülke SK, s.r.o.
Mostenická 3 3
971 01 Prievidza | Slovakia
Telefón +421 46 549 45 87
www.schuelke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Straße 2
22851 Norderstedt | Germany
Telefón +49 40 52100582
www.schuelke.com
info@schuelke.com



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom oprávnenia výrobcu podľa § 13 ods. 1 nemeckého zákona o liekoch a certifikátov o dodržiavaní GMP pre lieky