

schülke -+



Vysoko koncentrovaný dezinfekčný prípravok vo forme tabliet na báze aktívneho chlóru. Vhodný k dezinfekcii všetkých umývateľných plôch a povrchov, odolných voči pôsobeniu chlóru

**Účinný na
klostrídie**

chloramix® DT

Naše Plus

- Jednoduché dávkovanie a použitie
- Široké spektrum účinnosti
- Silný a rýchly účinok aktívneho chlóru
- Stabilný a dlhodobo skladovateľný
- Vhodný tiež k dezinfekcii výleviek a k ohniskovej dezinfekcii

Oblasti použitia

Chloramix DT sú univerzálne dezinfekčné chlórové tablety k širokému použitiu. Sú vhodné k dezinfekcii umývateľných plôch a predmetov vo všetkých oblastiach zdravotníctva, komunálnej hygieny, potravinárstva a inštitúciách. Vhodné k dennej dezinfekcii i likvidácii ohniskovej infekcie. Prípravok je vhodný do všetkých priestorov, ktorú sú vystavené silnej biologickej a infekčnej záťaži alebo vyžadujú vysokú úroveň hygieny. Vhodné tiež k dezinfekcii výleviek, podlahových mís, pisoárov, bidetov, toaliet, umývadiel, obkladov atď. Pracovný roztok prípravku **chloramix DT** je kompatibilný s viacerými typmi materiálov, napr. plasty (PE,PP,PVC), keramika, sklo, smalt, pryž, latex, plexisklo a pod. Nepoužívajte na poškodené povrchy, hlavne tie kovové.

Účinnosť

Baktericídny, kompletne virucídny, mykobaktericídny, tuberkulocídny, fungicídny, sporocídny.
Pre bližšie informácie o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Návod na použitie

Príprava roztoku: Dezinfekčný roztok pripravíte vložením príslušného počtu tabliet do vody o teplote 20-25 °C. Po rozpustení tabliet (cca 10 minút) roztok dôkladne premiešajte. Roztok sa aplikuje pomocou náteru alebo postreku. Malé vodeodolné predmety a textilie je možné dezinfikovať ponorením do roztoku. K požadovanej mikrobiologickej

účinnosti dodržte predpísaný expozičný čas a koncentráciu pracovného roztoku. Plochy a predmety, ktoré majú prísť do kontaktu s vodou, potravinami alebo krmivami opláchnite po dezinfekcii dôkladne pitnou vodou.



Zloženie

100 g prípravku **chloramix DT** obsahuje nasledujúce aktívne látky:

- 75 g Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát

Obsah aktívneho chlóru min. 43%, to je min. 1,5 g akt. Cl₂/tableta.

Riedenie:

1 tbl/1,5 l vody - 0,43% koncentrácia Cl₂, čo je 4300ppm jednotiek aktívneho Cl₂

1 tbl/5L vody - 0,129% koncentrácia Cl₂, čo je 1290ppm jednotiek aktívneho Cl₂

Zvláštne upozornenia

Určené pre profesionálny trh. Roztok uchovávať v uzavretých nádobách. Pri práci používajte ochranné pracovné pomôcky. V kontakte s kyselinami uvoľňuje toxické plyny. Môže mať bieliaci účinok. Nepoužívajte na poškodené povrchy, hlavne tie kovové.

Doba expirácie: 36 mesiacov.

Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
Chloramix dt 1 kg	6/Kartón	319022



Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke vyrába svoje produkty inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržania vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku

Biocídny prípravok



GEPRÜFTES
UMWELTMANAGEMENT
REG. NR. D-150-10003



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumin, Česká republika
Telefón +420 558 320 260
www.schulke.cz