



Tekutý prípravok určený na dezinfekciu a čistenie invazívnych nástrojov a povrchov zdravotníckych pomôcok

Čistí a dezinfikuje
v jednom kroku

discleen® extra

Naše Plus

- Rýchly a spoľahlivý účinok
- Výborná materiálová kompatibilita
- Použitie aj v prítomnosti pacientov
- Ľahké dávkovanie pomocou dávkovacej fľaše

CE 1023

Oblasti použitia

Vhodný pre manuálnu dezinfekciu a čistenie nástrojov, pomôcok a povrchov zdravotníckych pomôcok. Vhodný pre použitie aj v prítomnosti pacientov (napr. pôrodnice a novorodenecké oddelenie, ARO, JIP, rehabilitácia a liečebne). Prípravok je kompatibilný s mnohými druhmi materiálov, ako je nerezová oceľ, farebné kovy a ich zliatiny, pochrómované a smaltované povrchy, sklo, porcelán a plasty

Účinnosť

Baktericídny, virucídny na BVDV / Vaccinia / MVA, mykobakteriocídny, fungicídny
Pre získanie viac informácií o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Návod na použitie

Na dezinfekciu a čistenie nástrojov sa riedi vodou s teplotou 20-25 ° C na požadovanú koncentráciu. Nástroje určené na reprocessing sa ponorí do pripraveného roztoku tak, aby boli úplne ponorené a roztokom boli naplnené všetky duté časti po stanovenú dobu expozície. Po expozícii a následnom čistení sa nástroje vyberú z roztoku a dôkladne sa opláchnu pitnou vodou. Plochy zdravotníckych pomôcok je možno dezinfikovať a čistiť aj pomocou oteru. Silne znečistené plochy sa najskôr mechanicky očistia a potom dezinfikujú. Prípravok nie je vhodný pre záverečnú dezinfekciu kritických a semikritických zdravotníckych pomôcok.



Zloženie

100 g prípravku **discleen® extra** obsahuje nasledujúce aktívne látky:

- 3,5 g Alkylbenzyltrimethylammonium chloride
- 5,0 g Didecyltrimethylammonium chloride
- 6,6 g N- (3-aminopropyl) -N-dodecylpropane-1,3-diamine

Fyzikálno-chemické vlastnosti

Bod vzplanutia	62 °C / Metóda : Vypočítaná hodnota
Farba	žltý
Forma	kvapalina
pH	9 - 10 / 100 % / 20 °C

Zvláštna upozornenia

Určené pre profesionálny trh. Neodporúča sa miešať s inými prípravkami či detergenty. Nie je kompatibilný s prípravkami na báze aldehydov. Nepoužívajte na silikón a latex, polykarbonát, mäkké PVC a prírodné aj syntetické gumené.

Doba expirácie: 24 mesiacov

Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
Discleen extra 1 l	12/Kartón	70000087
Discleen extra 5 kg	1/Kanister	70000088

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke svoje produkty vyrába inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržanie vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku

Zdravotnícky prostriedok



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com