



Dvojitý tekutý dezinfekčný prípravok určený pre druhý a vyšší stupeň dezinfekcie termolabilného inštrumentária a endoskopov

**Rýchly
účinnok**

discleen® endo PAA

Naše Plus

- Rýchly a spoľahlivý účinok
- Celé spektrum účinnosti do 5 minút
- Výborná materiálová kompatibilita
- Jednoduchá aplikácia a manipulácia

Oblasti použitia

discleen® Endo PAA je určený pre druhý a vyšší stupeň dezinfekcie termolabilného operačného a anestéziologického inštrumentária, rigidných a flexibilných endoskopov. Aktivovaný roztok **discleen® Endo PAA** je vhodný pre operačné a anestéziologické inštrumentárium, pevné i flexibilné endoskopy, zdravotnícke pomôcky vyrobené z chirurgickej nerezovej ocele, farebných kovov a ich zmesí (mimo pozinkovaných častí a farbeného eloxovaného hliníka), plastu, silikónu, skla a akrylátu.

Účinnosť

Baktericídny, plne virucídny, mykobakteriocídny, tuberkulocídny, fungicídny, sporocídny.
Pre získanie viac informácií o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Návod na použitie

Pracovný roztok sa aktivuje dôkladným premiešaním obsahu oboch balenia. Celý obsah fľaše **discleen® Endo PAA** - aktivátor sa vleje do kanistra **discleen® Endo PAA** - báza. Kanister s oboma zložkami sa uzavrie a dôkladne premieša. Po 20 minútach je pracovný roztok pripravený na použitie. Prípravok sa ďalej neriedi. Aplikuje sa na čisté a suché zdravotnícke pomôcky (bez organickej záťaže a zvyšku čistiacich alebo dezinfekčných látok). Po uplynutí expozičnej doby musí byť zdravotnícke pomôcky opláchnuté vodou podľa platnej legislatívy. Aktivovaný nekontaminovaný pracovný roztok, skladovaný v kanistri alebo v uzavretej

dezinfekčnej vani, je použiteľný po dobu 7 dní. Jeden pracovný roztok môže byť použitý až 50 dezinfekčných cyklov. Aktivita pracovného roztoku sa priebežne kontroluje testovacími prúžkami **discleen® Endo PAA**. Obsah kyseliny peroxyoctovej v roztoku nesmie klesnú pod hranicu 900 ppm. Pri manipulácii s pracovným roztokom používajte pracovné ochranné pomôcky (rukavice a okuliare). Dátum a čas aktivácie roztoku musí byť zaznamenané. Použitie testovacích prúžkov: Kontrolu aktivovaného dezinfekčného roztoku vykonávajte pomocou testovacích prúžkov vždy na začiatku pracovnej zmeny, pri zvýšenej frekvencii dezinfekcie zdravotníckych pomôcok a po dlhších prestávkach. Ak sú zdravotnícke pomôcky nedostatočne umyté alebo vysušené, výrazne ovplyvňujú obsah kyseliny peroxyoctovej v dezinfekčnej kúpeli.

CE 1023



discleen® endo PAA

Zloženie

100 g discleen® endo PAA (báza + aktivátor) obsahuje nasledujúce aktívne látky:

- 0,23 g generované kyseliny peroxyoctové

Zvláštne upozornenia

Určené pre profesionálny trh. Dodržujte dôsledne inštrukcie na použitie. Pri práci používajte ochranné pracovné pomôcky. Nepoužívajte na gumu, plasty typu ABS, POM, PA6, PVC pozinkované a eloxované hliníkové materiály. Skladujte mimo dosah tepelných zdrojov a priameho slnečného žiarenia. Doba expirácia: 18 mesiacov

Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
Discleen endo paa set cz, sk, pl	1/Kartón	70000089
Discleen endo paa set tr, eng	1/Kartón	70000266

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke svoje produkty vyrába inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržanie vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku

Zdravotnícky prostriedok



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.



Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com