



Vysoko koncentrovaný granulovaný dezinfekčný prípravok na báze aktívneho chlóru. Určený k dezinfekcii všetkých umývateľných plôch a povrchov, odolných voči pôsobeniu chlóru.

**Ohnisková
dezinfekcia**

chloramix® D

Naše Plus

- Vhodný k bežnej a ohniskovej dezinfekcii
- Vysoký obsah aktívneho chlóru (55%)
- Rýchly a spoľahlivý účinok
- Dlhodobá skladovateľnosť
- Tiež k dezinfekcii plôch postriekaných krvou a telovými tekutinami

Oblasti použitia

Chloramix D je vhodný k dezinfekcii akýchkoľvek umývateľných plôch a predmetov, odolných voči pôsobeniu chlóru, a to v oblastiach zdravotníctva, komunálnej hygieny, potravinárstva, inštitúcií, hospodárstva a veterinárnej starostlivosti. Produkt je vhodný k bežnej a k ohniskovej dezinfekcii v miestach, kde je vyššia biologická záťaž či riziko infekcie. Pracovný roztok prípravku **chloramix D** je kompatibilný s viacerými typmi materiálov, napr. plasty (PE,PP,PVC), keramika, sklo, smalt, pryž, latex, plexisklo a pod. Nepoužívajte na poškodené povrchy, hlavne tie kovové.

Účinnosť

Baktericídny, kompletne virucídny, mykobaktericídny, tuberkulocídny, fungicídny.
Pre bližšie informácie o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Návod na použitie

Dezinfekčný roztok pripravíte rozmiešaním odmeraného množstva prípravku **chloramix D** vo vode o teplote 20-25 °C. Vopred odstráňte z plôch a predmetov viditeľné znečistenie. Roztok sa aplikuje pomocou náteru alebo postreku. Malé vodeodolné predmety a textilie je možné dezinfikovať ponorením do roztoku. K požadovanej mikrobiologickej účinnosti zvolte správnu koncentráciu a dodržte expozičný čas. Plochy a predmety, ktoré majú prísť do kontaktu s

vodou, potravinami alebo krmivami opláchnite po dezinfekcii dôkladne pitnou vodou.



Zloženie

100 g prípravku chloramix D obsahuje nasledujúce aktívne látky:

- Dichlorisokyanurát sodný, dihydrát

Obsah aktívneho chlóru min. 55%

Zvláštne upozornenia

Určené pre profesionálny trh. Nemiešajte s inými prípravkami. Roztok uchovávajte v uzatvorených nádobách. Pri práci používajte ochranné pracovné pomôcky. V kontakte s kyselinami uvoľňuje toxické plyny. Môže mať bieliaci účinok. Nepoužívajte na poškodené povrchy, hlavne tie kovové. Doba expirácie: 60 mesiacov.

Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
chloramix T 2 kg	1/Kanister	70000241

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke vyrába svoje produkty inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržania vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku

Biocídny prípravok



Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumin, Česká republika
Telefón +420 558 320 260
www.schulke.cz