

schülke -+



Pena na dezinfekciu a čistenie chirurgických nástrojov

**Hustá
dezinfekčná
pena**

gigazyme® actifoam +

Naše Plus

- Dezinfikuje a čistí v jednom kroku
- Ochrana nástrojov i personálu
- Moderný a užívateľsky jednoduchý prístup v starostlivosti o chirurgické nástroje
- Hustá pena s vysokou stabilitou
- Zabraňuje zasychaniu biologického materiálu na povrchu chirurgického nástroja
- Vďaka komplexu troch enzýmov rýchlo rozkladá organické zvyšky

CE 1023

Oblasti použitia

gigazyme® actifoam + je dezinfekčný prípravok vo forme peny, s výbornou čistiacou schopnosťou. Vysoko aktívna pena tiež zamedzuje zaschnutiu biologickej záťaže na povrchu operačného inštrumentária a nástrojov v priebehu transportu a potrebné doby čakania na predsterilizačnej prípravu operačného inštrumentária.

Účinnosť

Baktericídny, levurocídny, obmedzene virucídny, tuberkulocídny, mykobakteriocídny
Pre získanie viac informácií o mikrobiologickej účinnosti a expozičnej dobe kontaktujte zástupcu spoločnosti Schülke.

Návod na použitie

Použitý operačný inštrumentár vložte do dekontaminačnej nádoby (kontajnery, nádoby) a naneste na povrch nástrojov súvislú vrstvu peny, potom nádobu uzavrite. Pred predsterilizačnou prípravou z nástrojov dôkladne opláchnite zvyšky peny a organické záťaže a pokračujte v reprocessingu. Prípravok sa neriedi, je určený na priame použitie. Nie je určený na čistenie endoskopov, nástrojov vyrobených z hliníka, eloxovaného hliníka, polykarbonátu a pozinkovaných povrchov.



gigazyme[®] actifoam +

Zloženie

100 gigazyme[®] actifoam+ obsahuje:

N- (3-aminopropyl) -N-dodecylpropione-1,3-diamín 0,27 g, 2-Phenoxyethanol 0,2 g, didecyl-dimethylammoniumcarbonate 0,55 g

Ďalšie látky: tenzidy, enzymatický komplex, antikorozívna látka

Zvláštne upozornenia

Skladovať v originálnych, dobre uzavretých obaloch, v suchých priestoroch pri teplotách od +5 do + 25 ° C. Zvyškové množstvo prípravku aplikovať v súlade s návodom na použitie alebo odovzdať na likvidáciu oprávneným firmám. Prázdne obaly po dôkladnom vypláchnutí odovzdajte na recykláciu.

Doba expirácie: 24 mesiacov

Objednávkové informácie

Názov produktu	Balenie	Číslo výrobku
gigazyme actifoam + 750 ml FL	12/Kartón	70002877

Životné prostredie

Spoločnosť Schülke svoje produkty vyrába inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržanie vysokých štandardov kvality.

Typ prípravku

Zdravotnícky prostriedok tr.IIb



Spoločnosť Schülke & Mayr GmbH je držiteľom povolenia pre výrobu liečiv podľa § 13 ods. 1 zákona o liekoch a držiteľom certifikátov GMP pre lieky.

Distribútor
Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk
schulkesk@schuelke.com

Výrobca
Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com